

FICHE TECHNIQUE INDICATEUR STERILISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Indicateur chimique permettant de vérifier l'efficacité de la stérilisation par vapeur d'eau.

Combinaison des paramètres de stérilisation : température, durée, vapeur d'eau saturée.

L'exposition à un cycle de stérilisation fait varier la couleur de l'indicateur de jaune à noir au bout de 15 min à 121°C ou 5 min 30 à 134°C.

Conformes aux normes : UNI EN 285, UNI EN ISO 17665-1 et ISO 11140-1.

MODE D'EMPLOI

A. Placez l'intégrateur E5110 dans le milieu de chaque paquet à stériliser et mettre les paquets dans l'autoclave.

B. Une fois que le cycle de stérilisation est terminé et avant d'utiliser le matériel, effectuer un contrôle de l'intégrateur E5110 :

- Si tout le cycle de stérilisation s'est correctement déroulé, l'intégrateur change sa couleur initiale du jaune au noir pendant le processus de stérilisation.

- Si la couleur se révèle être encore jaune ou tachetée, tout le matériel ne pourra pas être considéré stérilisé et il est recommandé de répéter la procédure.

C. Il est recommandé, pour utiliser au mieux l'intégrateur E5110, de fournir une formation appropriée à tous les opérateurs chargés de la stérilisation.

D. L'intégrateur permet également l'identification facile du matériel qui a déjà été traité, de celui qui n'a pas encore été stérilisé.

E. E5110 contrôle tous les paramètres de la stérilisation à vapeur.

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimension	Conditionnement
E5110	60 x 100 mm	Carton de 20 boîtes. Boîte de 250 indicateurs doubles

PHOTO

