


MINI-COLLECTEURS DASRI STIL'ECO

0.6L - 0,8L - 1.1 L

ESSENTIA

MONTAGE et FIXATION

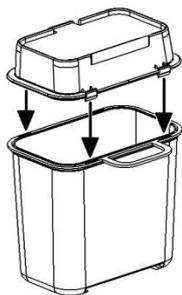

1. Présenter le couvercle au dessus de la cuve, avec la charnière du couvercle côté poignée



**POUR PLUS DE FACILITÉ,
CLIPPER LES CROCHETS 1 PAR 1**

2. Fixer le collecteur sur le support sélectionné :



FERMETURE PROVISOIRE

Entre chaque usage




Fermer la trappe,
languette de manipulation
vers le haut

**Respecter la limite
de remplissage**



FERMETURE DEFINITIVE

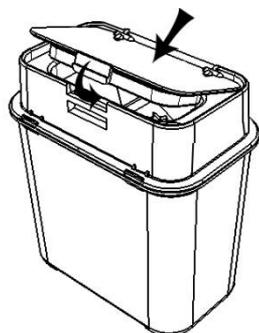


1. Plier la languette
vers le bas




2. Refermer la trappe en vérifiant
que la languette rentre
dans son logement

3. Puis **presser fortement sur la trappe côté languette**, le « clic » assure la fermeture définitive

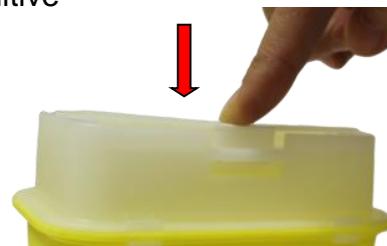

FONCTIONNALITES DU COUVERCLE

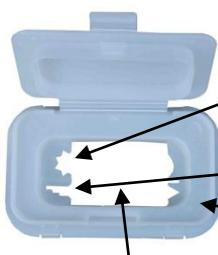

Opercule pour gros embouts vissés
type stylos à insuline

Opercule pour embouts seringues vissés

Opercule pour embouts seringues éjectables

Grande ouverture pour déchets larges

