

## DIVAN LICATA – 2 PLANS L. 80 CM – SELLERIE PLATE

## **DIMENSIONS DIVAN:**

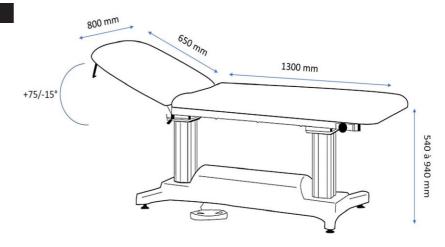

## **FONCTIONNEMENT:**


• Réglage hauteur du divan par un moteur électrique et commande au pied :

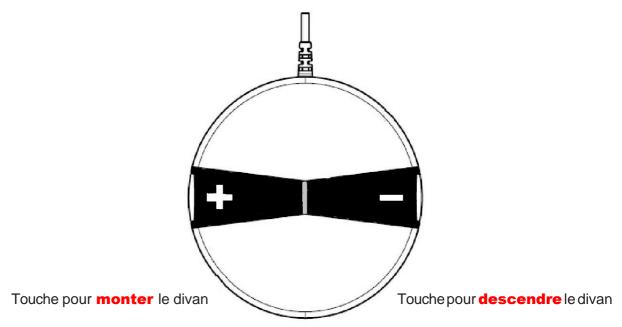

Réglage du dossier par vérin à gaz (commande bilatérale)

# DIVAN LICATA – 2 PLANS L. 80 CM – SELLERIE PLATE

## MISES EN GARDE:

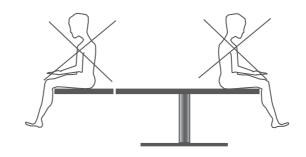

#### Un divan est fait:

- pour s'assoir au centre de la sellerie
- pour s'allonger

#### Un divan n'est pas fait pour :

 pour s'assoir aux extrémités (dossier et pieds)

### Moteur électrique:

- Secteur: 230 V AC 50/60HzInterrupteur bipolaire: 230 V 16A
- Câble de connexion électrique: 250 V 16A



Ne branchez pas le divan sur des secteurs ayant des caractéristiques différentes de celles indiquées ci-dessus. Il est interdit d'ouvrir ou de modifier des parties et des composants du moteur électrique.

## **CONDITIONS DE NETTOYAGE:**

#### **PRÉVENTIONS:**

Les tissus enduits de COTTING résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne.

Ils répondent à la norme D60-070 concernant les produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques. S'ils sont régulièrement entretenus, ils conservent leur souplesse et éclat d'origine.

- Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les tâches d'encre qui deviennent vite indélébiles.
- Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
- Éliminer régulièrement les traces de transpiration.
- Éviter une exposition prolongée près d'une source de chaleur.

#### **MINIMUM REQUIS:**

- Dépoussiérer.
- Nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine)

### **PRODUITS A PROSCRIRE:**

- Alcool et/ou acétone non dilué.
- Tous solvants et détergents.
- Produits d'entretien abrasifs.
  (En cas d'utilisation, ces produits dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants)

