


## DIVAN CAIX – 2 PLANS – L. 80 CM – HAUTEUR HYDRAULIQUE

### DIMENSIONS DIVAN:

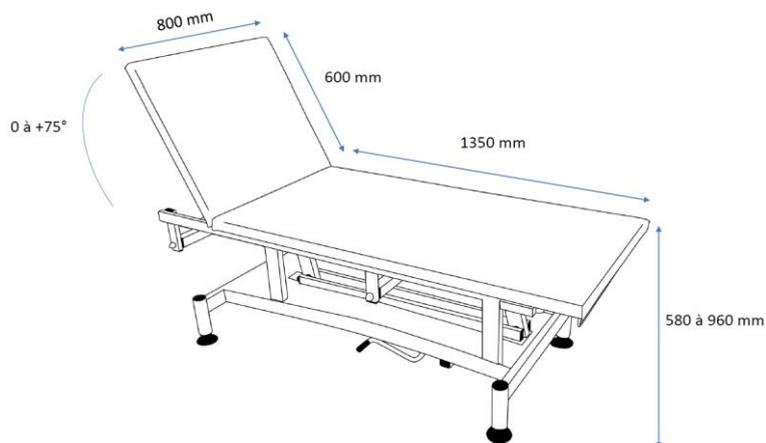

### FONCTIONNEMENT :


- Réglage du dossier par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Divan sur pompe hydraulique.

**Pour monter le divan, il faut presser sur la pédale.**

**Pour descendre le divan, il faut lever la pédale.**

# **DIVAN CAIX – 2 PLANS – LARGEUR 80 CM – HAUTEUR HYDRAULIQUE**

## **MISES EN GARDE :**

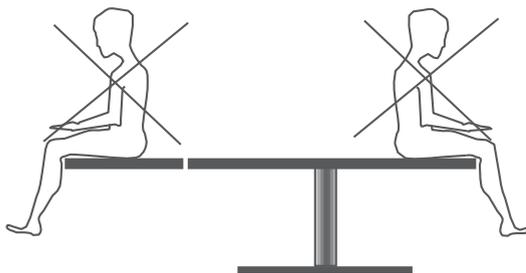

### **Un divan est fait :**

- pour s'asseoir au centre de la sellerie
- pour s'allonger

### **Un divan n'est pas fait pour :**

- pour sauter dessus
- pour s'asseoir aux extrémités (dossier et jambière)

## **CONDITIONS DE NETTOYAGE :**

### **PRÉVENTIONS :**

Les tissus enduits de COTTING résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils répondent à la norme D60-070 concernant les produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques. S'ils sont régulièrement entretenus, ils conservent leur souplesse et éclat d'origine.

- Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les tâches d'encre qui deviennent vite indélébiles.
- Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
- Éliminer régulièrement les traces de transpiration.
- Éviter une exposition prolongée près d'une source de chaleur.

### **MINIMUM REQUIS :**

- Dépoussiérer.
- Nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine)

### **PRODUITS A PROSCRIRE :**

- Alcool et/ou acétone non dilué.
  - Tous solvants et détergents.
  - Produits d'entretien abrasifs.
- (En cas d'utilisation, ces produits dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants)