

Tondeuse chirurgicale 3M™ à tête pivotante

Protocole d'utilisation

Coupez court
aux risques
d'infections

Mise en place de la lame

Fixation



- Interrupteur en position OFF.
- Basculer la tondeuse de 45° par rapport à la lame.
- Insérer une nouvelle lame à usage unique.
- Un "clic" confirme la fixation correcte de la lame.


Retrait

- A l'aide de l'index, pousser la lame pour la faire tomber dans un container à déchets.
- Utiliser une nouvelle lame pour chaque nouveau patient.



Utilisation de la tondeuse chirurgicale 3M™

Vers l'avant

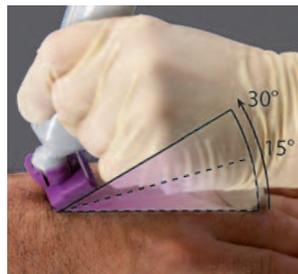

- Incliner la tondeuse de 15 à 30° par rapport à la surface cutanée et pousser la tondeuse délicatement vers l'avant.

- Tondre à rebrousse-poil pour de meilleurs résultats.

Vers l'arrière



- Faire pivoter la lame de 180°.
- Incliner ensuite suivant un angle de 15 à 30° par rapport à la surface cutanée.
- Tirer la tondeuse vers soi ou "ratisser" délicatement.
- Ne jamais appuyer de façon excessive.

Entretien

Rinçage



- En position "OFF", retirer la lame.
- Rincer la tête de la tondeuse sous l'eau courante avant désinfection.
- Ne jamais immerger la tondeuse chirurgicale.

Désinfection et séchage



- Appliquer une solution de désinfection à l'aide d'une compresse.
- Sécher avec une compresse.

Recharge de la tondeuse



- Autonomie :
 - 90 min si utilisation lame pivotante
 - 65 min si utilisation lame Premium.
- Cycle de charge : 12 à 14 heures.
- Laisser la tondeuse en charge entre les utilisations (pas de risque de surcharge).
- **La charge initiale est de 24 heures.**

3M