



# BM-100A

Bilirubinomètre



DAVID

Code d'identification  
de stock [300314]

Distribué  
par



30 rue Jean de Guirmand - 13290 Aix-en-Provence - France  
www.gsh-med.fr - info@gsh-med.fr - tél. : +33 (0)4 42 90 31 31

## Descriptif du produit


- Diverses applications : néonatalogie, pédiatrie, salle d'accouchement, service de néonatalogie et urgences néonatales, etc.
- Écran couleur : Écran tactile couleur 3 pouces, affichage à l'écran de plusieurs données de mesure, pour une excellente expérience de fonctionnement.
- Batterie rechargeable : équipé d'une base de charge, d'une batterie rechargeable intégrée durable, pratique d'utilisation pour le personnel médical.
- Source lumineuse durable : lampe à éclats au xenon avec longue durée de vie ( $\geq 150\,000$  mesures).
- Indicateur de tension faible : un indicateur de tension faible s'active en cas de faible capacité de la batterie.
- Conversion des unités : conversion entre deux types d'unités de mesure mg/dL,  $\mu\text{mol/L}$ .
- Mode de mesure : cette fonction permet de prendre 2 à 5 mesures pour obtenir une valeur moyenne.
- Stockage de données : possibilité de stocker les données de plusieurs patients.

## Configuration standard

Corps principal (sonde optique, écran, batterie, circuit principal), base et adaptateur secteur.



## Simplicité de fonctionnement

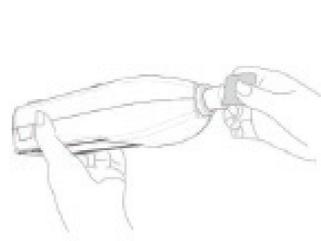


1. Nettoyer la sonde optique avec de l'alcool médical.



2. Maintenir enfoncé l'interrupteur d'alimentation 5 secondes pour allumer l'appareil et accéder au menu.



3. Saisir l'identifiant de l'infirmière et l'identifiant de l'enfant sur l'écran tactile.

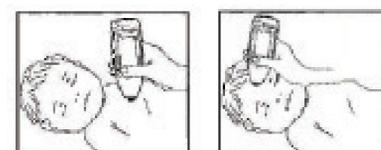

4. Placer la sonde optique à la verticale du point de mesure (sternum ou front), appuyer doucement jusqu'au flash.



Ningbo David Medical Device Co.,Ltd

Adresse : Bldg No. 5 Ningbo Smart Park, #98 Chuangyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, Chine  
Tél. : 0086-574-8780 0008 ou 8780 0007  
E-mail : sales@nbdavid.com Site Internet : www.nbdavid.com P.C. : 315048

Distribué par



30 rue Jean de Guiramand - 13290 Aix-en-Provence - France  
www.gsh-med.fr - info@gsh-med.fr - tél. : +33 (0)4 42 90 31 31