

# FICHE TECHNIQUE

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush®

CODE ARTICLE: 628613

## CVB50A

DATE D'EDITION: 22/02/2018 14:02:03



# INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

**Désignation** 

**Application** 

CVB50A

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush®

- Brosse à usage unique pour prélèvement cervico-vaginal
- Les caractéristiques de la Cervex-Brush® la prédestinent au
- dépistage du cancer du col de l'utérus

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

relative aux dispositifs médicaux. Classe I

**Conditionnement** Carton (nombre de pièces)

1000



# FICHE TECHNIQUE

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush®

CODE ARTICLE: 628613

#### CVB50A

DATE D'EDITION: 22/02/2018 14:02:03

#### Minimum de vente (nombre de pièces) 50

## Descriptif du produit

Matière du manche	Plastique
Matière de la brosse	Polyéthylène
Partie sécable	Tête amovible
Longueur totale (en mm)	199,00
Longueur du manche (en mm)	165,00
Emballage	Vrac
Niveau de stérilité	Non st <mark>éril</mark> e
Usage unique	Oui

Mode d'emploi

- 1 Identifier la lame, mettre en place le spéculum et moucher le col.
- 2 Introduire la CERVEX BRUSH dans le canal endocervical et exercer une légère pression jusqu'à ce que les fibres épousent tous les contours de col de l'utérus.
- 3 Maintenir cette pression et tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4 Etaler lentement le prélèvement sur la lame. Répéter l'opération après avoir retourné la brosse.
- 5 Fixer immédiatement. La lame est prête à être techniquée et interprétée par le cyto-pathologiste.

#### Autres caractéristiques

- Dispositif composé :

d'une tige mince plastique en polypropylène de 16,5 cm de long d'une brosse amovible, portant des fibres flexibles en polyéthylène de différentes longueurs : Les poils les plus longs sont dans le prolongement direct du manche et pénètrent profondément dans la partie endocervicale. Les plus courts sont répartis de chaque côté des poils longs centraux et suivent les contours du col de l'utérus (surface exocervicale et zone transformationnelle)

- Ne pas utiliser quand l'emballage est ouvert ou détérioré.
- Ne jamais réutiliser. Ne jamais stériliser soi-même.
- Usage strictement réservé au personnel médical.

# **Traçabilité**

Présence d'un numéro de lot Présence d'une date de péremption Oui

Oui



# FICHE TECHNIQUE

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush®

CODE ARTICLE: 628613

## CVB50A

DATE D'EDITION: 22/02/2018 14:02:03

Durée de vie (en mois)

60

# In LAREILIANS

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur

Référence du fournisseur

Pays d'origine

ROVERS MEDICAL DEVICES BV

380100311

PAYS-BAS





