

LI GEL PADS STICKY

Groupe : **Le bouton Stop pour les règles douloureuses**

Sous-groupe :



Livia - Gel pads autocollant

LIVIA, le bouton STOP aux règles douloureuses !

* Livia est un produit dédié aux femmes, ce petit appareil soulage les règles douloureuses grâce à l'électrostimulation.

* LIVIA s'utilise avec 2 électrodes recouvertes, pour qu'elles collent parfaitement à votre peau, chacune d'un autocollant : les gel pads

* Il est conseillé de changer ces 2 gel pads à chaque cycle menstruel

* Ce paquet contient 6 paires de gel pads (donc pour 6 cycles menstruels)

* Comment remplacer les gel pads ?

1. Enlevez les gel pads usés de vos électrodes LIVIA
2. Ouvrez l'emballage d'une paire de gel pads LIVIA
3. Retirez la protection du côté de l'opercule transparent
4. Alignez les gel pads sur les électrodes et retirez les opercules blanches

* Ces autocollants gel pads ne sont compatibles et ne s'utilisent qu'avec l'appareil LIVIA

Emballage	Quantité	code EAN	L(mm)	l(mm)	H(mm)	Kg
PIECE	1	7290016952056	0	0	0	0
CART_OUT	150	17290016952053	600	200	210	0
PALET	1	87290016952052	0	0	0	0

Garantie (mois):

24

Tarif Douanier:

Nombre batteries: **no battery**

Batteries Inclus

Alimentation: