

SUPRASORB® F

Pansement Film semi- perméable- Stérile

REF : 20461, 20463, 20464, 20465, 20466, 82799, 82800, 82061, 82801, 82062

PRODUIT :

REF 20461, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 5 x 7 cm, référence hôpital,
REF 20463, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 10 x 12 cm, référence hôpital,
REF 20464, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 10 x 25 cm, référence hôpital,
REF 20465, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 15 x 20 cm, référence hôpital,
REF 20466, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 20 x 30 cm, référence hôpital,

REF 82799, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 5 x 7 cm, référence officine,
REF 82800, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 10 x 12 cm, référence officine,
REF 82061, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 10 x 25 cm, référence officine,
REF 82801, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 15 x 20 cm, référence officine,
REF 82062, Suprasorb® F, Pansement Film semi- perméable, Stérile, 20 x 30 cm, référence officine.

COMPOSITION :

Film en polyuréthane transparent.

Masse adhésive : polyacrylate.

Applicateur : film en polyester recouvert de polyéthylène sur une face et de silicone sur l'autre face.

Papier protecteur siliconé.

CARACTERISTIQUES :

Pansement transparent, flexible et auto- adhésif.

La bande adhésive rouge au centre du protecteur se détache suivant des pointillés, facilitant l'enlèvement du protecteur et assurant une application aseptique.

Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air (taux de transmission de la vapeur d'eau : MVTR : 750 à 1250 g/m²/24h).

Imperméabilité à l'eau et aux microorganismes.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Sous sachet pelable individuel puis sous boîte.

Suprasorb® F, Pansement Film Semi- perméable Stérile						
REF	Code ACL	Code LPPR	Applicateur	Dimensions (surface adhésive)	Conditionnement de base	Carton Standard
20461			Oui	5 x 7 cm	100 sachets	1000 sachets
20463			Oui	10 x 12 cm	50 sachets	200 sachets
20464			Oui	10 x 25 cm	10 sachets	140 sachets
20465			Non	15 x 20 cm	10 sachets	400 sachets
20466			Non	20 x 30 cm	10 sachets	180 sachets
82799	3401075630838	1367837	Oui	5 x 7 cm	10 sachets	380 sachets
82800	3401075631088	1384847	Oui	10 x 12 cm	10 sachets	100 sachets

82061	3401043190463	1326927	Oui	10 x 25 cm	10 sachets	140 sachets
82801	3401075631149	1344397	Non	15 x 20 cm	10 sachets	400 sachets
82062	3401043190524	1313037	Non	20 x 30 cm	10 sachets	180 sachets

INDICATIONS :

Protection des plaies peu ou pas exsudatives et superficielles : plaies post-opératoires, dermabrasions, escarres.... ou comme pansement secondaire pour fixer un pansement non adhésif. Peut être utilisé aussi comme moyen de fixation de cathéters.

CONTRE- INDICATIONS :

Plaies infectées, plaies profondes et plaies fortement exsudatives.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer sur peau sèche.

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Références avec applicateur :

- 1- Plier le pansement de façon à séparer la bande rouge du protecteur,
- 2- Oter les deux parties du protecteur,
- 3- Etirer légèrement le pansement et l'appliquer sur la peau en lissant notamment les bords (sur la peau saine) pour qu'il adhère bien,
- 4- Retirer l'applicateur rigide.

Nota : Il est également possible de ne retirer qu'une partie du protecteur, d'appliquer le pansement, puis de retirer la seconde partie du protecteur et de coller le pansement en totalité, retirer ensuite l'applicateur.

Références sans applicateur :

- 1- Décoller le protecteur parallèlement aux bordures de préhension,
- 2- Etirer légèrement le pansement et l'appliquer sur la peau en lissant notamment les bords pour qu'ils adhèrent bien,
- 3- Enlever les bordures de préhension.

Usage unique.

STERILISATION :

Les pansements films Suprasorb® F semi- perméables sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.