

<i>Description générale</i>	Montre infirmière portative étanche avec système d'accroche par épingle de sûreté. La montre infirmière n'est pas un dispositif médical au sens de la Directive 93/42/CE	
<i>Pièces jointes</i>	Non	
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Code ACL</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Enlever la montre de son support en silicone et nettoyer la partie en silicone avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à 70°. Pour le corps de la montre, passer un chiffon humide. La montre est étanche.
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Produits attaquant le silicone et le métal.	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Boîtier de montre + corps en silicone
<i>Matières</i>	Silicone, métal, plastiques et protège cadran en verre.	
<i>Norme</i>	EN 61000-6-1 : 2001 et EN 61000-6-3 : 2001 + A11 : 2004	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Boîtier en métal avec mousse de protection à l'intérieur.
<i>Stockage particulier</i>	Non	
<i>Durée d'utilisation</i>	Continue	
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Logo COMED
<i>Références + extensions</i>	24 300 40-41-45-46-47-48-49-51-52-60-62-65 / 24 303 00	
<i>Désignation</i>	Montre infirmière en silicone	
<i>Dimensions Lo x La (mm)+- 3mm</i>	85 x 40	
<i>Epaisseur (mm)</i>	10	
<i>Cadran ø (mm)</i>	25	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	28	
<i>Couleurs</i>	40 = Blanc ; 41= Bleu ; 45 = Noir ; 46 = Rose ; 47 = Vert ; 48 = Violet ; 49 = Rouge ; 51 = Jaune ; 52 = Orange ; 53 = Fuchsia ; 60 = Zèbre ; 62 = Fleurs ; 65 = Léopard ; 67 = Gouttes d'eau ; 24 303 00 = kit blanc, bleu, rose	
<i>Pile</i>	Pile bouton SR626SW	
<i>Résistance température (°C)</i>	-20° à +50°C	
<i>Utilisation</i>	Lecture de l'heure et notation des pulsations minutes.	
<i>Mode d'emploi</i>	<p>Pour mettre en fonction la montre, la dégager de son corps en silicone puis enlever la languette protectrice située sur le remontoir. Tirer sur le remontoir et le tourner pour régler l'heure avant de le l'enfoncer pour enclencher le mécanisme. Remettre le cadran dans le corps en silicone du côté opposé à l'épingle de fixation.</p> <p>Changement de la pile : A l'arrière de la montre, ouvrir le boîtier à l'aide de l'encoche prévue à cet effet. Soulever la partie arrière à l'aide d'un outil fin et pointu. Enlever la protection blanche en plastique et retirer la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérer la nouvelle pile en</p>	

	respectant la polarité, le + vers le haut. Remettre la protection blanche et refermer le boîtier.
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas se piquer avec l'aiguille de l'épingle de sûreté. Ne pas laisser au soleil. Vous pouvez remarquer avant la mise en fonction de la montre que l'une des aiguilles peut bouger. Ceci est lié au fait que l'entraînement du mouvement n'est pas encore activé, dès que la languette protectrice de la pile sera retirée et le mécanisme enclenché, l'aiguille ne pourra se mouvoir que dans un sens.
<i>Recyclage</i>	Oui
<i>Récupération</i>	Remise à une entreprise de déchets agréée ou chez votre revendeur COMED. La pile doit être déposée dans un récupérateur dédié aux piles usagées auprès de votre distributeur (voir également la procédure PILES sur www.comed.fr)
<i>Latex/Antistatique</i>	Non/Non
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/Oui voir procédure DEEE sur www.comed.fr
<i>Phtalates/PVC</i>	NC/NC
<i>RoHs</i>	NC
<i>Données de sécurité</i>	Symboles de dangers = nul Phrases R et S = nul