

Nouveau



PRIX
PRODUIT
GAGNANT
2014, 2015

iWALK 2.0

Béquille au genou, mains libres

REPRENEZ UNE VIE NORMALE



CLASSE I
DISPOSITIF
MÉDICAL
FDA CE

- Élimine douleur aux mains / aux aisselles /aux poignets
- Facile à apprendre
- Sûr
- Confortable
- Poids léger
- Solide
- Peu coûteux



BÉQUILLES ET SCOOTERS DE GENOU SONT OBSOLETES.



Monter des escaliers



Cuisiner



Garde d'enfants



Jardinage



Shopping



Promener votre chien

Béquille au genou, mains libres

APPRENEZ À UTILISER iWALK2.0 EN 3 ÉTAPES FACILES



1. ASSEMBLER

L'assemblage de l'iWALK2.0 est facile, rapide et ne nécessite pas d'outils.



2. ADAPTER

UN BON AJUSTEMENT EST ESSENTIEL! Ajuster l'iWALK2.0 en suivant attentivement nos instructions, trouvées à l'intérieur de la boîte ou au www.iwalk-free.com/help.



3. UTILISER

Apprenez à utiliser votre iWALK2.0! Nos instructions permettent de marcher sans difficulté, d'utiliser les escaliers et enlever votre iWALK2.0.

Courroie facile à ajuster avec rembourrage confortable

Ouverture et fermeture rapide des boucles

Plate-forme du genou, rembourrée et ergonomique



Ajustement en hauteur instantané grâce au bouton presseur

Plante de pied remplaçable

QUI PEUT L'UTILISER?

La plupart des gens peuvent utiliser l'iWALK2.0, mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Assurez-vous que vous répondez à ces exigences minimales :

- Les blessures sont à une seule jambe
- Les blessures sont en dessous du genou
- Vous avez la pleine fonctionnalité de votre jambe indemne
- Vous pouvez plier votre jambe blessée à 90 degrés.

Aptitudes avant votre blessure:

Avant votre blessure vous étiez apte à marcher normalement, monter ou descendre des escaliers sans utiliser la rampe comme support ou pour retenir votre équilibre.

*POUR TOUTES BLESSURES AU MEMBRE INFÉRIEUR SANS MISE EN CHARGE, INCLUANT : BLESSURE AU TENDON D'ACHILLE, ENTORSE OU FOULURE AU PIED OU CHEVILLE, ULCÈRE DU PIED, FRACTURE AU TIBIA/PÉRONÉ.

Blessures au bas de la jambe*

Produit Pirate Leg d'iWALKFree. Droit d'auteur 2015 protégés par les lois américaines et internationales sur les brevets www.iwalk-free.com/patent.



MARCHER AVEC l'iWALK2.0 POUR LA PREMIÈRE FOIS EXIGE UNE FORMATION ET DES CONNAISSANCES DE BASE. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET UN SUCCÈS RAPIDE, VEUILLEZ CONSULTER LES VIDÉOS D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE iWALK2.0.

TAILLE UNIQUE

Poids: max 275 lb (125kg)

Hauteur: min 4'10" (147cm) / max 6'6" (198cm)

E iWALK 2.0 SIZE CHART - based on user's height

4'10" to 5'1"	5'1" to 6'1"	6'1" to 6'6"
147.5 cm to 155.0 cm	155.0 cm to 185.5 cm	185.5 cm to 198.0 cm
Review the Leg Length Diagram below.	The iWALK2.0 will fit you. Proceed to next page	Review the Leg Length Diagram below.

F iWALK 2.0 SIZE CHART - based on user's leg length

iWALK 2.0 LEG LENGTH DIAGRAM

