

Vous avez choisi d'acquiescer un produit de DUPONT MEDICAL : le cadre de marche articulé et pliant ROMA ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce cadre de marche.

Mise en garde : La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le cadre de marche avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT :

- Seuls les patients dont le poids n'excède pas 100 kg peuvent bénéficier de ce cadre de marche.
- L'utilisation du cadre de marche sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

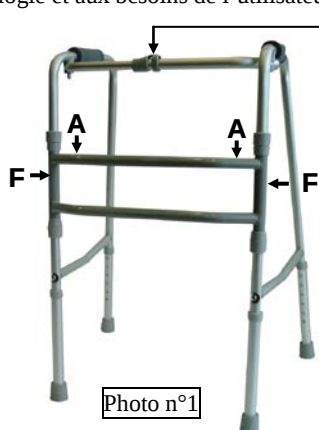


Photo n°1

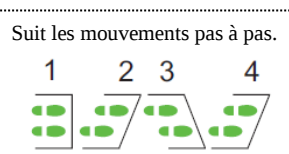


Photo n°2

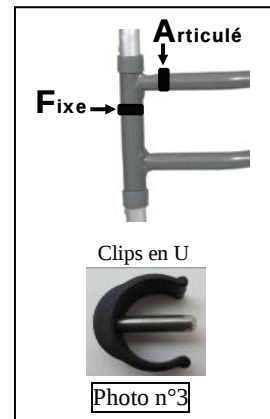


Photo n°3

Présentation du produit :

- Le cadre de marche est livré plié entièrement monté.
- Après avoir contrôlé l'état général, vérifier la présence, le serrage et le verrouillage de tous les éléments mécaniques.
- Positionner le cadre sur ses pieds puis écarter l'un après l'autre les deux demi-côtés jusqu'à ce que le verrou de pliage soit entièrement verrouillé. Pour replier le cadre, procéder de manière inverse en appuyant sur le verrou de pliage.
- Régler la hauteur des 4 pieds en appuyant sur les boutons poussoirs (flèche photo n°2) puis ajuster à la longueur souhaitée.

Attention : Les 4 boutons poussoirs doivent tous être positionnés au même niveau de réglage sur les 4 pieds du cadre (photo n°1).

NOTE : Il est possible de bloquer temporairement la fonction articulée du cadre en déplaçant les 2 clips en U (photo n°3 - position cadre Fixe).

IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le cadre.
- Vérifier la stabilité du cadre et l'efficacité du verrou et des boutons poussoirs de réglage en hauteur avant de le confier au patient.
- Ne jamais tenter de déplacer le cadre ou modifier la hauteur si l'utilisateur est en appui sur celui-ci.
- Ne pas suspendre de poids sur le cadre afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du produit et éviter tout basculement.

Attention : Ne pas forcer pour replier le cadre, appuyer au préalable sur le verrou pour désengager le mécanisme de verrouillage et s'assurer que les 2 clips en U sont à la position A (photo n°3 - position cadre Articulé).

- Ne pas tenter d'articuler le cadre si les 2 clips en U sont positionnés de chaque côté du cadre (photo n°3 - position cadre Fixe).

Utilisation :

- Avant d'utiliser le cadre pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée à la morphologie du patient.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées. Lorsque le corps est en équilibre, avancer d'un pas en soulevant légèrement (du même côté) le cadre vers l'avant puis procéder alternativement de la même manière en avançant d'un pas l'autre pied.

Note : Si la fonction articulée est bloquée (cadre rendu fixe par l'ajout des 2 clips en U en position F), il est nécessaire de soulever légèrement tout le cadre, le déplacer vers l'avant puis le reposer sur le sol et d'avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.

- Avant chaque utilisation, vérifier que : les 4 pieds du cadre ne sont pas tordus, le cadre est stable et les 4 boutons sont enclenchés.

Entretien régulier :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
 - Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
 - Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes et des poignées. **Ne jamais redresser un tube déformé suite à un choc.**
- Faire vérifier le cadre, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.**

Caractéristiques techniques : Dimensions hors tout (lpx) : 57 x 50 cm (hauteur mini.) (photo n°1) / 58 x 53,5 cm (hauteur maxi.)

Encombrement plié (lpxh) : 53 x 10 x 81,5 cm (hauteur mini.)

Hauteur réglable : de 79 à 91 cm (poignées) [6 positions - pas = 2,5 cm]

Largeur utile entre poignées : 45 cm

Couleur : gris métal / Matière : aluminium

Poids : 2,7 kg

Poids maximum utilisateur :  = 100 kg

Diamètre tube : 2,5 cm

Conditions de Garantie :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du produit et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final.

Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Fabriqué par Bliss Health Products en Chine - Distribué par :

DUPONT MEDICAL

Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame

54390 FROUARD (France)

Tél : 03 83 495 495

Fax : 03 83 495 496

www.dupont-medical.com

