
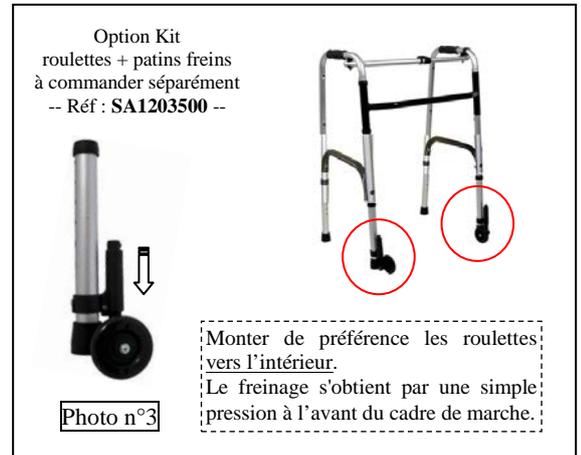


Vous avez choisi d'acquérir un produit de DUPONT MEDICAL : le cadre de marche pliant MIAMI ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce cadre de marche.

Mise en garde : La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le cadre de marche avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT :

- Seuls les patients dont le poids n'excède pas 100 kg peuvent bénéficier de ce cadre de marche.
- L'utilisation du cadre de marche sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

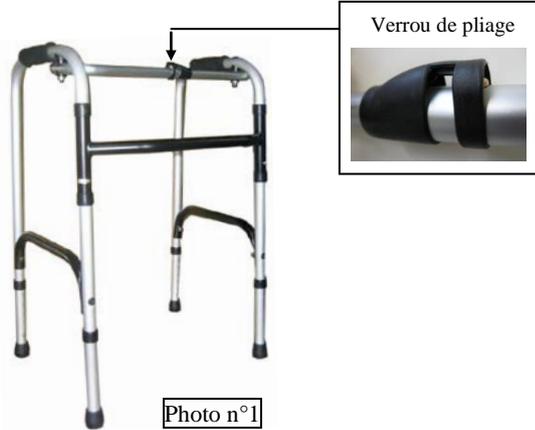

Présentation du produit :

- Le cadre de marche est livré plié entièrement monté. Si l'option kit roulettes + patins freins a été commandée, le kit est fourni non monté.
- Après avoir contrôlé l'état général, vérifier la présence, le serrage et le verrouillage de tous les éléments mécaniques.
- Positionner le cadre sur ses pieds puis écarter l'un après l'autre les deux demi-côtés jusqu'à ce que le verrou de pliage soit entièrement verrouillé. Pour replier le cadre, procéder de manière inverse en appuyant sur le verrou de pliage.

NOTE : Le montage du kit optionnel de roulettes se fait **uniquement à l'avant du cadre**, et en remplaçant les 2 tubes avant des pieds.

- Régler la hauteur des 4 pieds en appuyant sur les boutons poussoirs (flèche photo n°2) puis ajuster à la longueur souhaitée.

Attention : Les 4 boutons poussoirs doivent tous être positionnés au même niveau de réglage sur les 4 pieds du cadre (photo n°1).

- S'assurer que les boutons sont positionnés dans les trous d'indexage, qu'ils sont complètement engagés et que le verrou est enclenché.

IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le cadre.
 - Vérifier la stabilité du cadre et l'efficacité du verrou et des boutons poussoirs de réglage en hauteur avant de le confier au patient.
 - Ne jamais tenter de déplacer le cadre ou modifier la hauteur si l'utilisateur est en appui sur celui-ci (surtout avec le kit roulettes).
 - Ne pas suspendre de poids sur le cadre afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du produit et éviter tout basculement.
- Attention :** Ne pas forcer pour replier le cadre, appuyer au préalable sur le verrou pour désengager le mécanisme de verrouillage.

Utilisation :

- Avant d'utiliser le cadre pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée à la morphologie du patient.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées. Lorsque le corps est en équilibre, soulever légèrement le cadre, le déplacer (ou le faire rouler) vers l'avant puis le reposer sur le sol. Avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- **Utilisation du système de freinage** (cadre équipé du kit roulettes) : Le freinage se fait par pression au sol.
- Avant chaque utilisation, vérifier que : les 4 pieds du cadre ne sont pas tordus, le cadre est stable et les 4 boutons sont enclenchés.

Entretien régulier :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
 - Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants (+ roulettes et patins, si kit monté), les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
 - Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes et des poignées. **Ne jamais redresser un tube déformé suite à un choc.**
- Faire vérifier le cadre, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.**

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout (lpx) : 58 x 47,5 cm (hauteur mini.) (photo n°1) / 59 x 50,5 cm (hauteur maxi.)
 Encombrement plié (lpxh) : 57 x 9 x 80,5 cm (hauteur mini.)
 Hauteur réglable : de 79 à 91,5 cm (poignées) [6 positions - pas = 2,5 cm]
 Largeur utile entre poignées : 43 cm
 Couleur : gris métal / Matière : aluminium

Poids : 2,5 kg (sans kit roulettes)
Poids maximum utilisateur : = 100 kg
 Diamètre tube : 2,5 cm
 Diamètre roulette (en option) : 7,5 cm

Conditions de Garantie :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du produit et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



Fabriqué par Bliss Health Products en Chine - Distribué par :
DUPONT MEDICAL
 Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame
 54390 FROUARD (France)

Tél : 03 83 495 495
 Fax : 03 83 495 496
 www.dupont-medical.com

