

BD PosiFlush™ XS et SP

Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaires

BD PosiFlush™ XS Intérieur et extérieur stérile

Pour utilisation
sur champ stérile



BD PosiFlush™ SP Intérieur stérile et extérieur propre

Pour utilisation
hors champ stérile



Recommandations d'utilisation

1. PRÉPARATION



Débloquer le témoin d'intégrité en poussant sur la tige de piston avant de dévisser le protège-embout.

Un CLIC audible confirme l'opération.

2. PURGE



Dévisser le protège-embout de la seringue.

Purger l'air de la seringue en poussant légèrement le piston.



BD PosiFlush™ XS et SP

Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaires

3. CONNEXION



Connecter l'embout
Luer Lock à l'embase
du dispositif médical.

4. RINÇAGE PULSÉ



Pour un rinçage efficace,
il est conseillé d'effectuer
le **rinçage par pressions
successives** en actionnant
le piston en 5 poussées*.

5. ÉLIMINATION



Après utilisation, **éliminer la
seringue** selon les pratiques
en vigueur pour l'élimination
des déchets.

Ne pas réutiliser.

* Guiffant et al. Flushing of intravascular access devices (IVADs).
Efficacy of pulsed and continuous infusions. J Vasc Access, 2012.

HYP205 - 03/16 - BD, le logo BD et toutes
les autres marques sont la propriété de Becton,
Dickinson and Company.
© 2015 BD - AB•Com

BD Medical - Medication & Procedural Solutions
11, rue Aristide-Bergès, Z.I. des Iles
BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Tél. 04 76 68 36 36 - www.bd.com/fr

