

## Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Livorno Salotti Relax stoel.

Uw stoel is standaard meegeleverd met een her-oplaadbaar batterij, gelieve eerst aandachtig deze bijsluiter te lezen alvorens uw stoel in werking te stellen.

## Meegeleverd



Batterij-lader met netsnoer



Bouten M6 (2 stuks)



Lithium-ion batterij

## Instructies

### 1) Bevestig de batterij onderaan de stoel :

- |   |   |
|---|---|
| a) Bevestig de batterij op de plaats zoals aangeduid in de afbeelding en maak het vast met de meegeleverde M6 bouten. | b) Connecteer de batterij met de snoer van de laadpunt. |
|---|---|



### 2) Opladen van de batterij :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| a) Sluit de batterijlader voorzichtig aan op het laadpunt aan de zijkant van de stoel. | b) Zet de schakelaar op stand 0 (licht van de schakelaar staat uit) | c) Steek de batterijlader in een stopcontact.<br><b>Bij eerste gebruik min. 12 uren laten opladen.</b> |
|--|---|--|



**! Bij eerste gebruik min. 12 uren laten opladen.**

Het LED lampje van de lader brandt **GROEN** wanneer de batterij volledig opgeladen is. En **ROOD** tijdens het oplaadproces.

**! Wanneer u de batterij een geruime tijd niet gebruikt heeft, is het aangeraden om de batterij terug volledig op de laden alvorens gebruik. Dit om de levensduur en capaciteit van de batterij te bewaren. Lees ook zorgvuldig de bijsluiter van de batterij.**

- |   |
|---|
| d) U hoort een signaal wanneer de batterij bijna leeg is. Om de batterij te herladen, herhaal bovenste stappen. |
|---|

### 3) In gebruik stellen van de stoel :

- |  |
|--|
| a) Koppel de lader los van het laadpunt. <b>! De stoel NIET gebruiken terwijl de lader in het laadpunt zit!!</b> |
|--|
- b) Zet de schakelaar op stand I, licht van de schakelaar staat aan.
  - c) Stoel is klaar voor operationeel gebruik.
  - d) Bezoek ook onze website en youtube channel voor bijkomende instructie videos:  
Website: [Http://www.livornosalotti.com](http://www.livornosalotti.com)

## Avant-propos

Félicitations pour l'achat de votre nouveau fauteuil relaxation Livorno Salotti.

Votre fauteuil est équipé en standard d'une batterie rechargeable. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre fauteuil.

## Inclus



Chargeur de batterie avec cordon d'alimentation



Boulons M6 (2 pcs)



Batterie lithium-ion

## Instructions

### 1) Fixez la batterie au bas du siège :

- |   |  |
|---|--|
| a) Fixez la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et fixez-la avec les boulons M6 fournis. | b) Connectez la batterie au cordon du point de charge. |
|---|--|



### 2) Chargement de la batterie :

- |   |   |  |
|---|---|--|
| c) Connectez soigneusement le chargeur de batterie au point de charge situé sur le côté du siège. | d) Mettez l'interrupteur sur la position 0 (le voyant de l'interrupteur est éteint) | e) Branchez le chargeur de batterie sur une prise de courant.<br><br>⚠️ <b>Lors de la première utilisation min. 12 heures de charge.</b><br>Le voyant LED du chargeur s'allume <b>VERT</b> lorsque la batterie est complètement chargée. Et <b>ROUGE</b> pendant le processus de charge.<br><br>⚠️ <b>Si vous n'avez pas utilisé la batterie depuis longtemps, il est recommandé de charger complètement la batterie avant utilisation.</b><br>Il s'agit de préserver la durée de vie et la capacité de la batterie. Lisez également attentivement la notice de la batterie. |
|---|---|--|



- f) Vous entendrez un signal lorsque la batterie est faible. Pour recharger la batterie, répétez les étapes supérieures.

### 3) Mise en service du fauteuil :

- Débranchez le chargeur de la borne de charge. ⚠️ **N'utilisez PAS le fauteuil pendant que le chargeur est connecté avec le point de charge !!**
- Mettez l'interrupteur sur la position 1, le voyant de l'interrupteur est allumé.
- Le fauteuil est opérationnel.

Visitez également notre site Web et notre chaîne YouTube pour des vidéos d'instruction supplémentaires:

Site Web : [Http://www.livornosalotti.com](http://www.livornosalotti.com)