

# exeol surf 60

## Désinfectant de surfaces

- ▶ Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds, préalablement nettoyés.




Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

⚠ **exeol surf 60** s'utilise non dilué sur une surface préalablement nettoyée et rincée.


Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable. Il n'est pas conçu pour recharger d'autres flacons.




### Bidon 5L

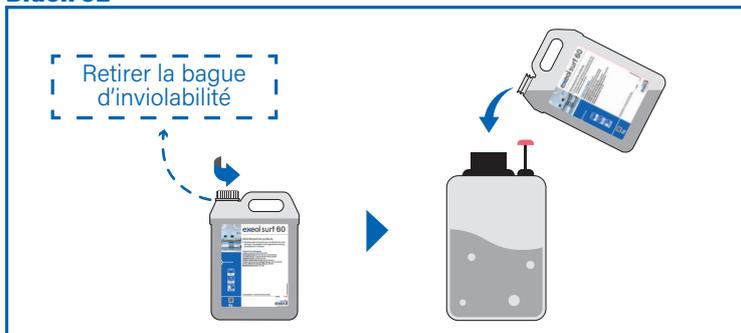

- 1** Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'inviolabilité. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon.

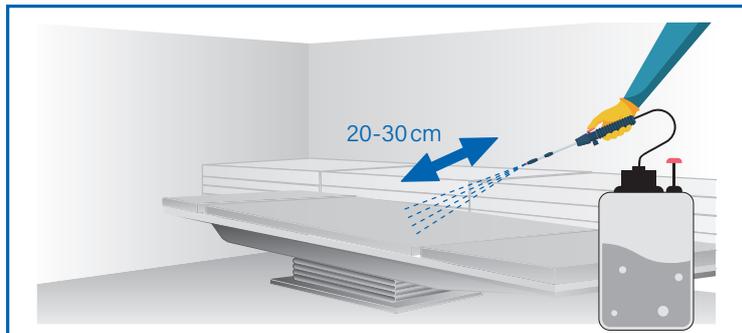

- 2** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ( $\pm 32 \text{ mL/m}^2$ , à 20-30cm de la surface).

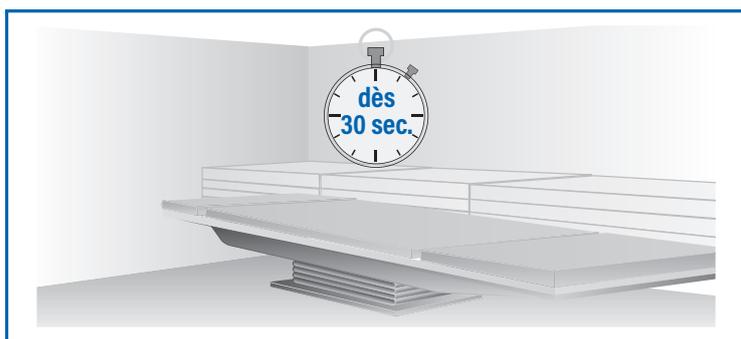

- 3** Temps de contact: dès 30 sec. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.



- 4** Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact direct avec la peau).

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. EPI :



UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ  
**exeol**

UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)