

# exeol surf optimal

Détergent désinfectant des surfaces sans alcool




► Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

SURFACES


Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.  
 ⚠ exeol surf optimal s'utilise non dilué.




Flacon 750 mL spray

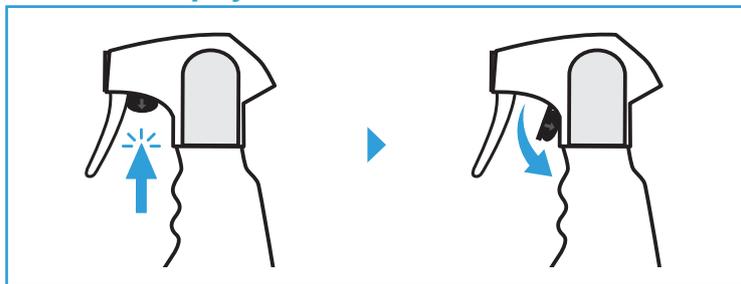


**1** Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse. Déverrouiller la sécurité du spray.

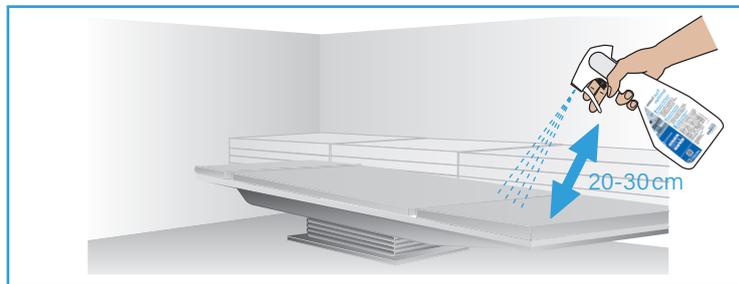

**2** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ( $\pm 6 \text{ mL/m}^2$ , à 20-30 cm de la surface).

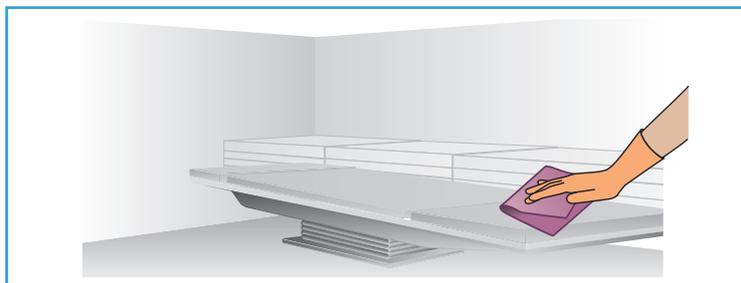


**3** Nettoyer la surface par essuyage.

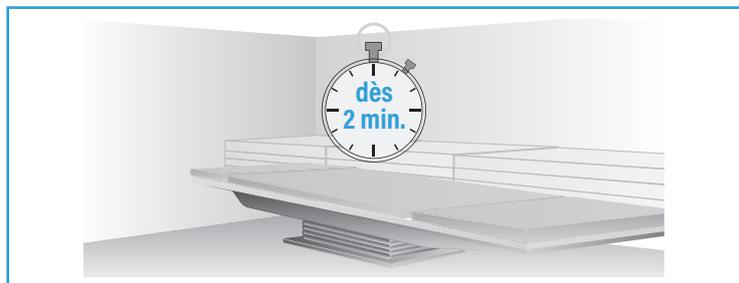

**4** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.



**5** Ne pas rincer (\*excepté les surfaces en contact direct avec la peau ou les denrées alimentaires).

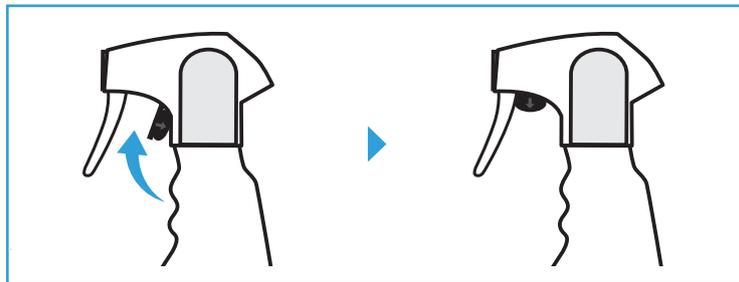

**6** Verrouiller la sécurité après utilisation.

Répéter l'opération et désinfection chaque fois que nécessaire.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ  
**exeol**

UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Sodel  
 190 rue René Barthélemy  
 14100 Lisieux, France.  
 TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)