

CURAFIX® i.v. Junior**Pansement de fixation de canule – Stérile**

REF : 31883

CODE CLADIMED:

C54K

PRODUIT :

REF 31883, Curafix® i.v. Junior – Pansement de fixation de canule avec fenêtre de contrôle, à usage pédiatrique, avec bande de sécurisation adhésive supplémentaire, 4,3 x 5 cm.

COMPOSITION :

Polyester, polyacrylate, polyuréthane, viscose, polypropylène, polyéthylène, papier glassine avec revêtement en polydiméthylsiloxane.

Le produit comporte également un coussin souple constitué d'un mélange de viscose et de PP/PE ajouté.

CARACTERISTIQUES :

Curafix® i.v. Junior est un pansement de fixation de cathéter à usage pédiatrique. Le produit est composé de non-tissé blanc, d'adhésif, de film et de papier protecteur. Le pansement est muni d'un coussinet de rembourrage séparé. Le produit contient une bande de sécurisation adhésive supplémentaire. Dans la partie supérieure du produit se trouve une fenêtre transparente qui permet le contrôle du site de ponction de la canule et du canal d'injection. Le pansement est lavable à l'eau et aux désinfectants à base d'alcool ou d'eau contenant de l'iode ou de l'octénidine.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Emballage stérile individuel.

CURAFIX® i.v. Junior, Pansement de fixation de canule		
REF	Conditionnement de base	Carton Standard
31883	100 pansements	600 pansements

INDICATIONS :

Pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Contre-indications : Allergie connue et/ou hypersensibilité à l'un des composants du produit.


Effets indésirables : Dans de très rares cas, des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent apparaître.

Mise en garde et mesures de précaution : Contrôler régulièrement si le site de ponction ne présente pas de rougeurs, d'irritations ou d'inflammations. En cas d'apparition d'une infection ou de signes d'inflammation quelconques (chaleur excessive, œdème, rougeur, douleur), c'est au personnel médical spécialisé de décider s'il y a lieu de continuer le traitement.

Remarques générales : Curafix® i.v. Junior est conçu pour un usage unique et ne doit pas être restérilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou s'il a été ouvert accidentellement.

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et les autorités sanitaires compétentes.

Conseils d'utilisation : se référer à la notice.

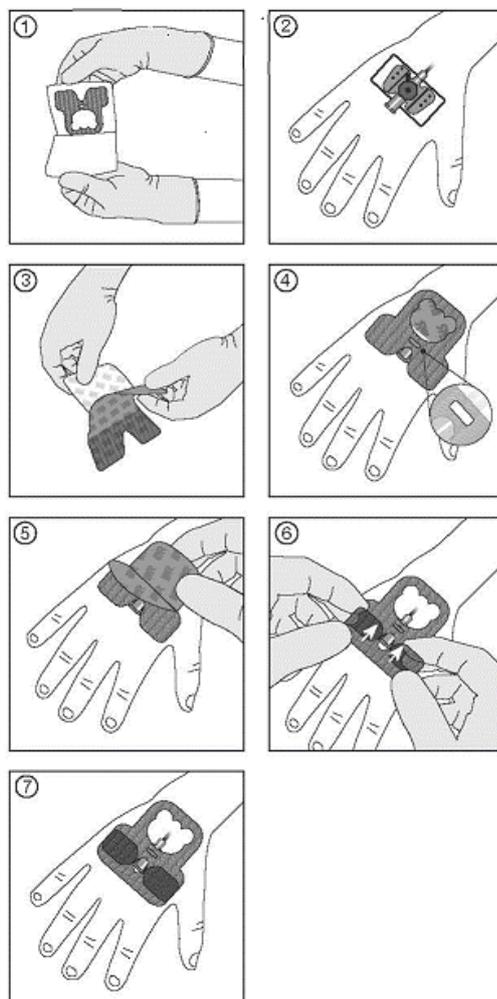

STERILISATION :

Le pansement Curafix® i.v. Junior est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Stocké de manière appropriée, dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

3 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.