

# CURAFIX® i. v. control

## Pansement pour fixation de cathéters – Stérile

REF : 30200

---

### PRODUIT :

REF 30200, Curafix® i.v. control – Pansement pour fixation de cathéters, 9 x 6 cm.

---

### CARACTERISTIQUES :

Le pansement pour fixation de cathéters Curafix® i.v. control est constitué de :

- 1 couche en non tissé 100% polyester de couleur blanche,
- 1 adhésif en polyacrylate,
- 1 film en polyuréthane
- 1 papier siliconé sur un côté, de couleur blanche,
- 1 compresse constituée d'une couche absorbante (75% viscose et 25% polypropylène / polyéthylène) recouverte d'un film de polyéthylène qui n'adhère pas à la plaie.

Ces pansements présentent :

- une fenêtre de contrôle pour vérifier le site de ponction, ce qui permet une détection rapide de tout signe potentiel d'infection sans avoir à changer le pansement,
- des bords arrondis pour prévenir le risque de décollement et d'enroulement du pansement sur lui-même,
- une fente centrale étroite pour réduire le risque d'infection au minimum,
- un trou perforé pour un positionnement facile du cathéter,
- un film laminé sur toute la surface, imperméable aux germes et bactéries, perméable à la vapeur d'eau, résistant aux désinfectants, et pouvant être nettoyé en surface.

Système d'application facile.

Permet une mise en place durable dans le temps et un confort pour le patient.

Absence de latex. Absence de Phatalates.

---

### PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Emballage stérile individuel.

CURAFIX® i. v. control		
REF	UCD	CDT
30200	50	400

---

### INDICATIONS :

Curafix® est un pansement destiné à la fixation de cathéters.

---

### MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Avant d'appliquer le pansement, nettoyer le site de ponction selon le protocole standard et tamponner la zone pour la sécher.

Appliquer la compresse additionnelle en-dessous des ailes de la canule afin de protéger la peau. Le film doit être positionné du côté de la peau.

Appliquer Curafix® i.v. control en positionnant le trou perforé autour de la valve d'accès.

Ne pas couper ou déchirer Curafix® i.v.control

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité.

---

**STERILISATION :**

Le pansement pour fixation de cathéters Curafix® i.v. control est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Péremption 5 ans à partir de la date de stérilisation.