



Fiche Technique

Référence : MEC 7513 COA

Gencod : 3401073757667



Photo non contractuelle

Mèche hémostatique stérile COALGAN®

Descriptif :

Boite de 5 mèches hémostatiques stériles

Composition & Présentation :

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale)

Mèche de 4 cm emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement β

Information complète sur la notice incluse

Utilisation :

La mèche est hémostatique et cicatrisante, et est à usage unique

Coalgan® doit toujours être utilisé dans son intégralité, il ne doit pas rester en place + de 24 h, et ne doit pas être réutiliser

Indications :

Coalgan est indiqué en cas de :

- Saignements de nez
- Saignements cutanés
- Saignements buccaux
- Extractions dentaires

Interactions :

Coalgan ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivres.

Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d'appliquer Coalgan®

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com

