

VLIWASORB® SENSITIVE**Pansement Hydrocellulaire super-absorbant – Stérile**

REF : 141820, 141821, 141822, 141823, 141824, 141825, 141828, 141829, 141830, 141831, 141832

PRODUIT :

REF 141820, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 7.5 x 7.5 cm, référence hôpital,
REF 141821, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 12,5 x 12,5 cm, référence hôpital,
REF 141822, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 10 x 20 cm, référence hôpital,
REF 141823, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 15 x 25 cm, référence hôpital,
REF 141824, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 20 x 20 cm, référence hôpital,
REF 141825, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 20 x 30 cm, référence hôpital,

REF 141828, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 12.5 x 12.5 cm, référence officine,
REF 141829, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 10 x 20 cm, référence officine,
REF 141830, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 15 x 25 cm, référence officine,
REF 141831, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 20 x 20 cm, référence officine,
REF 141832, Vliwasorb® Sensitive, Pansement Hydrocellulaire super absorbant, 20 x 30 cm, référence officine,

COMPOSITION :

Les pansements hydrocellulaires super absorbants Vliwasorb® Sensitive sont constitués ainsi :

- 1 couche de non-tissé respirante et étanche à l'eau,
- 1 couche de compresse super-absorbante,
- 1 couche de distribution en non tissé,
- 1 couche au contact de la plaie en silicone doux.

CARACTERISTIQUES :

Vliwasorb® sensitive est un pansement stérile pour utilisation sur des plaies modérément à fortement exsudatives. La construction multicouche facilite la gestion de l'exsudat afin de fournir un environnement humide optimal qui favorise une cicatrisation plus rapide de la plaie. La compresse absorbante fournit une absorption supérieure et enferme les exsudats. Ceci minimise le risque de macération et de dommage de la peau péri lésionnelle.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Emballage stérile individuel.

VLIWASORB® Pansement super absorbant				
REF	Code ACL	Code LPPR	UCD	CDT
141820			10 pansements	240 pansements
141821		6323566	10 pansements	160 pansements
141822			10 pansements	160 pansements
141823		6323537	10 pansements	80 pansements
141824			10 pansements	80 pansements
141825		6323520	10 pansements	80 pansements
141828	6940610104955	6323566	10 pansements	160 pansements
141829	6940610104962	6312835	10 pansements	160 pansements

141830	6940610104979	6323537	10 pansements	80 pansements
141831	6940610104986	6312829	10 pansements	80 pansements
141832	6940610104993	6323520	10 pansements	80 pansements

INDICATIONS :

Vliwasorb® sensitive est indiqué pour la gestion des plaies à la condition qu'elles soient modérément à fortement exsudatives, comprenant :

- les ulcères de la jambe,
- les escarres,
- les ulcères du pied diabétique,
- les plaies chirurgicales déhiscentes.

CONTRE- INDICATIONS :

1. Ne pas utiliser ce produit sur des plaies sèches ou faiblement exsudatives, les yeux, les muqueuses ou dans des cavités de plaie car le pansement gonfle pendant l'absorption. Ne pas utiliser sur des brûlures au troisième degré.
2. Le pansement super absorbant avec couche de silicone ne doit pas être utilisé sur des personnes avec une allergie connue ou une hypersensibilité au pansement ou à ses composants.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage. Ne pas couper le pansement.

1. L'application est effectuée par des professionnels de santé.
2. Nettoyer la plaie conformément aux procédures normales.
3. Sécher entièrement la peau environnante.
4. Retirer les films de protection et appliquer le côté adhésif à la plaie. La taille de pansement appropriée doit être sélectionnée pour permettre un chevauchement suffisant autour des berges de la plaie.
5. Vliwasorb® sensitive peut être utilisé à la fois comme pansement primaire ou comme pansement secondaire. Quand il est utilisé comme pansement primaire, Vliwasorb® sensitive doit être en contact étroit avec le lit de la plaie afin de garantir que l'exsudat de la plaie soit absorbé. Vliwasorb® sensitive est auto-adhésif mais peut nécessiter un soutien additionnel avec un pansement de fixation ou un bandage compressif léger à modéré.
6. La fréquence des changements de pansement dépend de la quantité d'exsudats.
7. Le retrait du pansement peut être facilité par l'humidification du pansement avec une solution saline.

Usage unique.

STERILISATION :

Le pansement super absorbant Vliwasorb® Sensitive est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité), de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

3 ans si les conditions de stockage sont respectées.