

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
21 16 059 001	KIT COUSSIN KINE/OSTEO DOMICILE + SAC TRANSPORT JOLETI	90 x 30 x 90 cm	KITOST
21 16 058 000	SAC RANGEMENT VIDE DOMICILE JOLETI	90 x 30 x 90 cm	CKSKIT/
21 16 057 000	COUSSIN RECTANGULAIRE MAINTIEN TÊTE JOLETI	40 x 30 x 5 cm	CKB01
21 16 056 000	COUSSIN CYLINDRIQUE JOLETI	43 x 13cm	CKB02
21 16 055 000	COUSSIN TRIANGULAIRE JOLETI	42 x 23 x 20 cm	CKB03
21 16 054 000	COUSSIN MAINTIEN TÊTE JOLETI	36 x 38 x 5 cm	CKB04
21 16 053 000	COUSSIN ENTRE JAMBRE JOLETI	28 x 18 x 7 cm	CKB05
21 16 052 000	COUSSIN MAINTIEN MEMBRE JOLETI	30 x 18 x 15 cm	CKB06
21 16 051 000	COUSSIN REPOSE JAMBE/ MAINTIEN DOS JOLETI	55 x 50 x 18 cm	CKB07
21 16 050 000	SAC RANGEMENT COUSSIN KINÉ JOLETI	90 x 30 x 90 cm	CKS

COUSSINS CARE PROGRESS POUR TABLES DE MASSAGE ET DE SOINS

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter un médecin avant d'utiliser un dispositif médical. Il vous conseillera et vous informera sur l'utilisation la plus appropriée de ce produit.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

CONTRE INDICATIONS



Ce produit est destiné aux professionnels de santé qui l'utilisent pour optimiser la prise en charge du patient allongé sur une table de massage ou un brancard. Les professionnels de santé sont formés à leur utilisation. Ne pas utiliser chez le patient dans un état clinique incompatible à la mobilisation (lésions, traumatismes).

Les patients ne doivent pas utiliser seuls ces produits.

SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION

	Picto fabricant		Invitation à consulter le manuel d'utilisation
	Picto distributeur		Dispositif médical
	Date de fabrication Lire étiquette sur le produit		Respecter les consignes de sécurité
	Numéro de lot Lire étiquette sur le produit		Conformité CE
	Référence du produit		Craint l'humidité

DESTINATION DU PRODUIT

Les coussins de la gamme sont destinés aux professionnels des soins et de rééducation (Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Infirmier, Urgentistes). Les coussins sont adaptés au format de la table de soins et du brancard.

La technologie micro-billes permet une adaptation parfaite aux formes et mouvements du corps grâce à une répartition naturelle des micro-billes. L'enveloppe des coussins est en polyuréthane Imperméable et respirant avec un accueil doux et confortable.

Pour le patient : Les coussins atténuent les douleurs et calent le patient et permettent une meilleure prise en charge par le soignant. Ils s'adaptent à sa morphologie tout en assurant confortablement son maintien. Ils permettent une position de détente plus facile pour le travail du professionnel

Pour le soignant : Permet de trouver la bonne installation globale du patient et de chaque zone à travailler. Offre une multitude de solutions et de combinaisons pour les soins du patient allongé sur la table de massage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de contamination pour le patient et de blessures.

A chaque utilisation vérifier que la décontamination du produit est bien faite et qu'il est parfaitement décontaminé suivant le protocole d'entretien que vous avez défini et avec le service Hygiène. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits chlorés qui sont non nettoyants et qui altèrent la matière.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de contamination et de blessures. Le service Hygiène de votre établissement aura testé l'entretien et aura élaboré son propre protocole en fonction de ses équipements.

Décontaminer le coussin entre chaque patient avec un bactéricide non chloré. (Spray, lingette)

Se référer aux conditions d'emploi et aux notices produits des produits décontaminants

Détacher au plus vite pour éviter toute migration de colorants dans la matière.

Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits chlorés qui sont non nettoyants et qui altèrent la matière.

L'utilisation du chlore peut entraîner un durcissement de la matière et à terme une délamination du coussin - en cas de contact rincer à l'eau claire immédiatement. Sécher avec un chiffon doux propre et sec après chaque décontamination.

En cas d'usure ou de déchirure, ne pas tenter de réparer la couverture : la mettre au rebut ou contacter un revendeur agréé pour savoir si elle peut être prise en charge par le SAV CLINIBED.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter le service en charge de l'élimination de ce type de déchets. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets de vous communiquer ses instructions.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et une altération du produit qui perdrait tout ou partie de son efficacité. Avant de le stocker vérifier qu'il est bien sec.

Le produit peut se stocker entre 0 et 50 °C. Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker vos produits :

Dans un endroit sec et tempéré. Le coussin doit être manipulé le moins possible pour éviter toute contamination inutile.

Protéger votre produit par un emballage de la poussière et utiliser des gants.

Ne pas y déposer de charges lourdes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage : par pique pour couture.

Garnissage : micro-billes Polystyrène

Enveloppe : 41% polyester – 59 % polyuréthane. Le polyuréthane contient des biocides selon la norme EU 528/2012 -Protection contre la détérioration micro—biologique. Ingrédients actifs : zinc-pyrrithione + silver + 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate.

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 2 ans en conditions d'utilisation et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur (justificatif d'achat à fournir). CLINIBED assure le SAV pour tout défaut de couture ou de défauts de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Toute réclamation SAV devra faire l'objet d'un retour du produit chez CLINIBED. Le retour se fera aux frais du demandeur. CLINIBED effectuera l'expertise et le diagnostic et l'enregistrement des anomalies dans le cadre du suivi qualité produit post-market selon le règlement UE 2017/745. CLINIBED réalisera la réparation ou le changement de produit s'il y a lieu. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation et d'entretien, de toute modification ne sont pas couvertes par cette garantie. CLINIBED ne prendra pas en charge le SAV d'un produit détérioré dans le cas d'une utilisation pour un patient inadapté. (Déchirure par les barrières du lit ou du brancard par exemple). Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



SARL G&C CLINIBED -1, Rue leuridan-Noclain – F 59150 WATTRELOS
Cette notice est visible sur le site www.clinibed.com



La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)

