

SEMELLES & TALONNETTES SILICONE AVEC INSERTS



EN SILICONE INSOLES & HEEL CUSHIONS
WITH INSERTS

ES PLANTILLAS Y TALONERAS DE SILICONA
CON INSERCIONES

FR FRANÇAIS

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.

ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions.

Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

RÉGLEMENTATION

[MD] Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

INDICATIONS

Talonnettes :

Indiquées pour soulager des talalgies, bursites et tendinites du tendon d'achille (Absorption des impacts). Eperon calcanéen (central ou latéral).

Semelles :

Talalgies, bursites, métatarsalgies, éperon calcanéen, pied diabétique, fasciites plantaires, pieds douloureux ou fatigués, pratique sportive.

CONTENU / DESCRIPTION

- Talonnettes silicone avec insert central (la paire) **ou** Talonnettes silicone avec insert latéral (la paire) **ou** Talonnettes plates silicone avec insert central (la paire) **ou** Semelles silicone avec inserts (la paire),
- Une notice du produit, à lire attentivement.

COMPOSITION

Gel Polymère.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 - Choisir la pointure appropriée.
- 2 - Mettre une talonnette ou une semelle à chaque pied, sauf avis contraire du médecin.
- 3 - Mettre la partie plate de la talonnette ou de la semelle en contact avec la semelle de la chaussure et la forme anatomique en contact avec le pied.
- 4 - Il est recommandé d'utiliser des chaussures larges et des chaussettes.
- 5 - Il est possible que vous ayez besoin d'une période de 2 à 3 jours pour vous habituer à la semelle, jusqu'à ce que son usage devienne agréable.

PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'atelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cic-

trices non protégées, gonflements ou rougeurs.
 Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.
 Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **Lot**, de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Collez les fixations auto-agrippantes entre elles (si le produit en est pourvu), lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veillez à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit.



TALONNETTES / HEEL CUPS / TALONERAS

INSERT CENTRAL / CENTRAL INSERT / INSERTO CENTRAL :
Modèles bilatéraux / Fits left or right / Modelos bilaterales.

INSERT LATÉRAL / SIDE INSERT / INSERTO LATERAL :
Modèles gauche et droit / Left and right models / Modelos izquierdo y derecho.

| Taille / Size / Talla | Pointure / Shoe size / Talla calzado (EU) |
|-----------------------|---|
| 1 | 35 - 38 |
| 2 | 39 - 42 |
| 3 | 43 - 46 |
| 4* | 47 - 50* |

* Uniquement pour talonnettes plates / Only for flat heels / Solo para taloneras planas.

SEMELLES / INSOLES / PLANTILLAS

Modèles gauche et droit / Left and right models / Modelos izquierdo y derecho.

| Taille / Size / Talla | Pointure / Shoe size / Talla calzado (EU) |
|-----------------------|---|
| 0 | 35 - 36 |
| 1 | 37 - 38 |
| 2 | 39 - 40 |
| 3 | 41 - 42 |
| 4 | 43 - 44 |
| 5 | 45 - 46 |



ORLIMAN®

FeetPAD

ORLIMAN S. L. U.

C / Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
 Apdo de correos 49 - C.P. 46185

La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com
 Export : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur France : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe / Orliman - 20, La Herbetais - 35520 La Mézière (France).

E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr



Visuels non contractuels / No contractual illustrations / Fotos no contractuales.

NUT20G#2_FeetPAD_Semelles&Talonnettes

Date de publication / Date of issue / Fecha de publicación: 2021-04

Date de révision / Revision date / Fecha de revisión: 2021-10 | v.2