

AIDAPT SAS
127 Rue des Prunus
82800 NEGREPELISSE
FRANCE

Coussin Bouée Anti-compression Gonflable avec Pompe VM934BB

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Veuillez examiner votre produit pour tout dommage visible avant de l'utiliser/l'installer. Si vous constatez un dommage ou suspectez un défaut, veuillez ne pas l'utiliser, contactez votre fournisseur.

UTILISATION PRÉVUE

Le coussin gonflable anti compression Aidapt réduit la pression lorsque vous êtes assis. Il aide aussi à répartir le poids uniformément et permet à l'utilisateur de maintenir plus facilement une position assise correcte.

Gonflez le coussin à la bouche à l'aide de la pompe.

NB. Évitez que des objets pointus tels que des fermetures éclair et des clés entrent en contact avec le coussin car cela pourrait endommager la housse ou l'intérieur gonflable.

NB. N'utilisez jamais de compresseur pour gonfler le coussin.

NB. Lorsque vous gonflez cet article à la bouche, vous devrez peut-être mordre la base de la valve tout en soufflant.

NETTOYAGE

Nettoyez votre coussin gonflable à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon doux légèrement humide uniquement. Utilisez uniquement un détergent ou désinfectant doux; n'utilisez jamais de nettoyeur abrasif. Après le nettoyage, essuyez le coussin avec un chiffon sec avant de le laisser sécher dans un endroit chaud et sec, mais pas en contact direct avec une source de chaleur.

SOIN ET ENTRETIEN

Veuillez effectuer un contrôle de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des inquiétudes.

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de/ ou établissant tout engagement contractuel ou autre par Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Pays de Galles) Ltd ou ses agents ou ses filiales et aucune garantie ou représentation concernant les informations n'est donnée.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lors de l'utilisation de ce produit.

En tant qu'utilisateur, vous engagez votre responsabilité concernant la sécurité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre produit.

