



FICHE TECHNIQUE

3M™ Steri-Strip™

Suture cutanée adhésive microporeuse renforcée

Marquage CE - BSI 0086 – N° de certificat : 0493 – Classe I Stérile

I - Indications

La suture cutanée 3M Steri-Strip est une bandelette adhésive conçue pour :

- La fermeture non invasive des plaies aiguës traumatiques ou chirurgicales en première intention, en remplacement précoce de fils ou d'agrafes, ou en association avec eux.
- La fixation de tubulure et de matériel médical légers
- La fixation de tous types de cathéters, (en base ou tubulure) en complément d'un pansement de maintien de cathéter.

La suture 3M Steri-Strip peut être posée sous plâtre ou résine.

II - Caractéristiques du produit

La suture 3M Steri-Strip permet avec une technique de pose simple et à une adhésivité spécifique, le rapprochement des berges de la plaie avec une congruence parfaite et une grande sécurité liée aux renforts longitudinaux en fils de polyester.

Il s'agit d'une technique non invasive ; elle est donc indolore et limite le risque d'infection locale ; elle permet une cicatrice esthétique sans marques de points et sans échelle.

La suture 3M Steri-Strip procure une cicatrice plus résistante plus rapidement qu'une suture au fil, offre de bonnes conditions de cicatrisation locale en raison de sa haute perméabilité à la vapeur d'eau et aux gaz, ainsi qu'une très bonne tolérance cutanée, avec une forte résistance à la traction. Elle n'est pas indiquée sur une plaie en zone de traction où le fil de suture offrira une meilleure résistance à la tension.

La suture 3M Steri-Strip ne laisse pas de résidus au retrait.

Le code couleur des sachets facilite le repérage de la taille désirée.

- Composition : (Absence de latex dans le produit et dans l'emballage)
 - Support : non tissé de fibres de rayonne renforcé par des fils de polyester.
 - Adhésif : copolymère d'acrylate hypoallergénique.
 - Liner : papier siliconé.
- Caractéristiques physiques :
 - Adhésivité au métal : 450-1200 g/25mm
 - Elongation (à la rupture) : 7% to 60%
- Tests de biocompatibilité :
 - Cytotoxicité : non cytotoxique.
 - Indice d'irritation primaire : légèrement irritant.
 - Test de sensibilisation : non irritant, non sensibilisant. Test de Draize négatif.
 - Hypoallergénique.
- Stérilisation :
 - Irradiation gamma (Cobalt 60). (Min : 22gGy – Max : 45kGy)
 - Effectuée par 3M Brookings Microlab, 601 22nd Ave. South, Brookings, South Dakota, 57006, USA.

- Date d'expiration du produit et conservation :
 - 5 ans dans des conditions de stockage normales de température et de pression.
- Mode de stérilisation possible :
 - Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène. La mesure de l'oxyde d'éthylène résiduel sera à la charge du client.
- Élimination des déchets :
 - Incinération
- Lieu de fabrication :
 - 3M Brookings Plant, 601 22nd avenue, South, Brookings, South Dakota, USA.

III - Présentations commerciales :

- Hôpital

Sutures cutanées 3M™ Steri-Strip™ renforcées

| Code | Référence | Dim. (mm x mm) | Strips /sachet | Sachets/Boîte | Gabarit |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| STR1540 | 1540/R violet | 75 x 3 | 5 | 50 | 4 |
| STR1541 | 1541/R rouge | 75 x 6 | 3 | 50 | 4 |
| STR1542 | 1542/R vert | 38 x 6 | 6 | 50 | 4 |
| STR1546 | 1546/R orange | 100 x 6 | 10 | 50 | 4 |
| STR1547 | 1547/R bleu | 100 x 12 | 6 | 50 | 4 |
| STR1548 | 1548/R brun | 125 x 25 | 4 | 25 | 4 |
| STR1549 | 1549/R gris | 50 x 12 | 6 | 50 | 4 |

Sutures cutanée adhésives stériles élastiques couleur chair

| Code | Référence | Dim. (mm x mm) | Strips /sachet | Sachets/Boîte | Gabarit |
|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| STR4540 | 4540 | 75 x 3 | 5 | 50 | 4 boîtes |
| STR4541 | 4541 | 75 x 6 | 3 | 50 | 4 boîtes |
| STR4542 | 4542 | 100 x 12 | 6 | 50 | 4 boîtes |
| STR4543 | 4543 | 125 x 25 | 4 | 50 | |

Sutures cutanées adhésives stériles sous pansement adhésif stérile transparent 3M™ Tegaderm™ ovale (62mmx48mm)

| Code | Référence | Dim. (mm x mm) | Strips /sachet | Sachets/Boîte | Gabarit |
|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| STR8512 | 8512 | 13 x 48 | 1 | 25 | 4 boîtes |
| STR8514 | 8514 | 13 x 48 | 3 | 25 | 4 boîtes |
| STR8516 | 8516 | 13 x 48 | 5 | 25 | 4 boîtes |

- Ville

| Référence | Code CIP/ACL | Dimensions (mm x mm) | Strips/ sachet | Sachets/Boîte |
|-----------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1540 | 659934.0 | 75 x 3 | 5 | 10 |
| 1541 | 659935.7 | 75 x 6 | 3 | 10 |
| 1546 | 660397.5 | 100 x 6 | 10 | 10 |

Admis à la LPP

*3M Science. Au Service de la Vie.

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée au risque et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

