

**OTE-AGRAFES 3M™ Precise™
à usage unique SR1 et SR3**



Ote-agrafe 3M™ Precise™ SR1



Ote-agrafe 3M™ Precise™ SR3


Dispositif Médical stérile de classe I selon la Directive 93/42/CEE

Les ôte-agrafes à usage unique 3M™ Precise™ sont universels et peuvent être utilisés pour retirer les agrafes de n'importe quelle marque. Usage professionnel uniquement.

Matériau : Acier inoxydable

Durée de conservation : 5 ans

Lieu de fabrication : Mexique

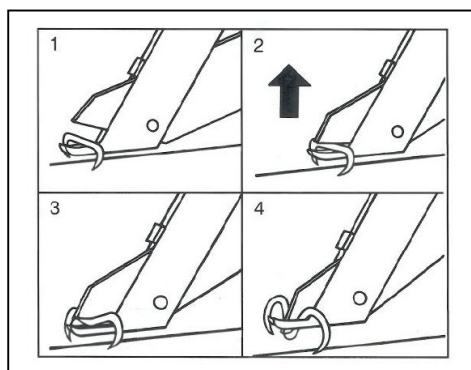

1. Insérer l'agrafe dans les mâchoires de l'ôte-agrafes.
2. Soulever légèrement l'agrafe pour la maintenir à 90° par rapport au plan cutané.
3. Resserer progressivement les deux branches de l'ôte-agrafes de façon à ré-ouvrir l'agrafe.
4. Retirer complètement l'agrafe.

3M

Fiche Technique

Sterile – Usage unique, ne pas réutiliser. La réutilisation peut créer un risque de contamination de la plaie, une infection du patient ou une infection croisée.

Mode de stérilisation : rayons gamma

Codes commande et conditionnement

Code Commande	Référence Produit	Désignation	Conditionnement
6466596	SR1	Ote-agrafe à usage unique - Pince	10 ote-agrafes
PRECSR3	SR3	Ote-agrafe à usage unique - Ciseaux	10 ote-agrafes/boîte

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



Tous les papiers se trient et se recyclent