

	Marque :	/
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	2 ans
	Année de mise sur le marché :	1994 en France
	Code CLADIMED :	M50ZZ99
	Code CND :	/
	Code GMDN :	10035
	Version :	D
	Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Film adhésif protecteur en flacon aérosol, destiné à améliorer la fixation et l'adhérence des bandes.

Caractéristiques

- Produit un effet d'accroche, permettant un parfait maintien des couches l'une sur l'autre,
- Réduit les risques de réactions cutanées au retrait du bandage,
- Disparaît rapidement après lavage à l'eau et au savon,
- Incolore, ne tache pas,
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition

Butane, méthylal, alcool dénaturé, isobutane, propane, glyceryl rosinate, paraffine perliquide.

Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

Conditionnement / Stérilisation

Flacon aérosol de 300 ml. Produit livré non stérile.

Référence

Code EAN13	Code Produit	Taille	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809003314	71602-00	Flacon de 300 ml	1	12	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. A conserver dans un milieu bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Protection des téguments vis à vis des adhésifs,
 Traction adhésive,
 Aide à la fixation de pansements ou de bandes de mousse de protection sous contention adhésive (domaine sportif).

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION**Mode d'emploi**

- Vaporiser d'un mouvement régulier à une distance de 5 à 10 cm de façon régulière afin de former une couche uniforme,
- Procéder à de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Précautions d'emploi

- Appliquer sur peau saine, propre et sèche, protéger toute plaie avant d'appliquer le produit,
- **EXTREMEMENT INFLAMMABLE**, récipient sous pression.
- Précautions d'utilisation des aérosols :
 - ✓ A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C,
 - ✓ Ne pas percer ou brûler même après usage,
 - ✓ Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent,
 - ✓ Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou tout appareil électrique en fonctionnement,
 - ✓ Ne pas fumer dans la pièce,
 - ✓ Bien ventiler la pièce après usage,
 - ✓ Ne pas inhaler, ne pas vaporiser vers les yeux,
 - ✓ Conserver le récipient hors de portée des enfants, dans un endroit bien ventilé.

Particularités d'utilisation

- **USAGE EXTERNE SEULEMENT** : Ne pas ingérer,
- Respecter les précautions d'utilisation propres aux aérosols.

Accessoires associés

Bandes, pansements.

Entretien

Non applicable.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Incinération ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux 72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 - 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485