

Velpeau® Set Post-opérateur

Set de pansement – 3 soins

REF : 190036, 190037, 190038

CODE CLADIMED :
 F51EZ02

PRODUIT :

REF 190036, Velpeau® set Post-opérateur - Set de pansement pour petites plaies.

REF 190037, Velpeau® set Post-opérateur - Set de pansement pour moyennes plaies.

REF 190038, Velpeau® set Post-opérateur - Set de pansement pour grandes plaies.

COMPOSITION :

	190036	190037	190038
3 Blisters stériles contenant chacun €€ 0373			
Champ de soin imperméable 38 x 45 cm	1		
Pincés anatomiques	2		
Compresse en non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5		
Compresse en non-tissé 10 x 10 cm		5	10
Hors du blister			
Notice d'utilisation	1		
3 Pansements adhésifs non tissés stériles €€ 0546	8 x 10 cm	10 x 15 cm	10 x 25 cm
3 Films adhésifs transparents stériles €€ 0546	10 x 15 cm	15 x 20 cm	15 x 30 cm
Sacs collecteurs de déchets	3		
Coupe-fil stérile €€ 2460	1		

CARACTERISTIQUES :

Assemblage de différents composants dans une boîte permettant 3 soins des plaies post-opératoires.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Boîte de 3 soins.

Velpeau® set - Set de pansement				
Référence Groupe	Code ACL	Code LPPR	Conditionnement de base	Carton Standard
190036	4063591022345	6323939	1 boîte	6 boîtes
190037	4063591022338	6323922	1 boîte	6 boîtes
190038	4063591022321	6323916	1 boîte	6 boîtes

INDICATIONS :

Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées, non infectées. Ablation des fils sur plaies suturées. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

CONTRE- INDICATIONS :

Ne pas utiliser le film adhésif stérile en pansement primaire. Ne pas utiliser le film adhésif stérile en pansement secondaire sur une plaie présentant des signes de surinfection, saignante ou très exsudative. Le coupe-fils doit être utilisé par un médecin ou un professionnel de santé qualifié. Les produits ne doivent pas être utilisés en dehors de leur

indication. Leur réutilisation n'est pas recommandée car les produits ne sont pas destinés à être lavés, désinfectés ou stérilisés après leur première utilisation. Allergies ou hypersensibilités connues à certains composants.

EFFETS SECONDAIRES :

Dans de très rares cas, des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent se produire.

MODE D'EMPLOI :**Préparation**

Se laver les mains en respectant les règles d'hygiène en vigueur (par lavage ou friction).

Préparer le matériel pour la réalisation du soin.

Sortir et installer un sac collecteur de déchets.

Sortir un blister stérile et un film adhésif transparent stérile nécessaires au soin.

Préparer les solutions de rinçage et/ou les produits de nettoyage et d'antisepsie prescrits.

Utilisation

Retirer le pansement souillé et le jeter dans le sac collecteur à déchets.

Se laver les mains par friction avec un gel hydro-alcoolique (non fourni).

Ouvrir le blister et prélever le champ de soin. L'installer face imperméable sur la table.

Sortir la paire de ciseaux de son blister et la poser sur le champ de soins.

Retirer les compresses du blister à l'aide de la pince bleue et les déposer sur le champ de soin.

Avec la pince bleue, prendre une compresse et la saisir avec la pince verte pour en faire un tampon. Nettoyer la plaie suivant le protocole médical. Jeter les compresses souillées dans le sac collecteur à déchets.

Si ablation de fils : utiliser les coupe-fils stériles et retirer les fils selon la prescription médicale.

Recouvrir la plaie avec le pansement adhésif stérile, puis poser par-dessus le film adhésif transparent pour rendre le pansement étanche et permettre la douche.

Enlever les deux feuilles de papier siliconées de l'adhésif, appliquer le film adhésif puis retirer la pellicule protectrice en tirant sur la languette bleue. Le film doit dépasser du pansement adhésif d'au moins 2 cm.

Rassembler les déchets hors piquants, coupants, tranchants dans le sac collecteur fourni dans le set. Ce sac devra être éliminé dans le circuit des déchets d'activité de soins à risque infectieux.

Après utilisation, le coupe-fils doit être jeté dans un collecteur ou une boîte pour déchets perforants, non fourni dans ce set.

Renouveler le soin en fonction de la prescription et/ou de l'état de la plaie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

N'ouvrir le dispositif médical qu'au moment de l'utilisation.

Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant usage.

Ne pas réutiliser le dispositif – en cas de réutilisation d'un dispositif médical à usage unique, il existe un risque de contamination, d'altération, de dysfonctionnement du produit.

Le dispositif doit être utilisé par des professionnels de santé formés au soin des plaies.

Les composants sont stériles dès lors que leur emballage reste fermé et non endommagé, ne pas utiliser si le packaging est endommagé ou a été accidentellement ouvert.

STERILISATION :

Les blisters, les films, et les pansements sont stérilisés individuellement à l'oxyde d'éthylène.

Les coupe-fils sont stérilisés au rayonnement

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Stocker, dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

Péremption déterminée par la date de péremption du composant le plus ancien, ne pouvant pas excéder 5 ans.