

Velpeau® set Détersion

Set de pansement pour plaies chroniques avec curette – 5 soins

REF : 108871

PRODUIT :

REF 108871, Velpeau® set Détersion - Set de pansement pour plaies chroniques avec curette.

COMPOSITION :**5 Blisters stériles contenant chacun :**

CE 0373

- 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm,
- 2 pinces anatomiques,
- 10 compresses de gaze coton hydrophile 10 x 10 cm

Hors du blister :

- 1 notice d'utilisation,
- 5 films adhésifs transparents stériles 10 x 15 cm,
- 5 sacs collecteurs de déchets,
- 1 curette stérile.

CE 0546

CE 0120

CARACTERISTIQUES :

Assemblage de différents composants dans une boîte permettant 5 soins.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Boîte de 5 soins

Velpeau® set Détersion - Set de pansement pour plaies chroniques avec curette				
Référence Groupe	Code EAN	Code LPPR	Conditionnement de base	Carton Standard
108871	4056649377337	1380915	6 boîtes	6 boîtes

INDICATIONS :

Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine nécessitant une détersion mécanique. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

CONTRE- INDICATIONS :

Ne pas utiliser le film adhésif stérile en pansement primaire.

Ne pas utiliser le film adhésif stérile en pansement secondaire sur une plaie présentant des signes de surinfection, saignante ou très exsudative.

Ne pas utiliser la curette pour : ulcère artériel, plaie du talon non explorée sans IPS, plaie/ escarre du talon en l'absence de revascularisation si IPS < 0,7, risque de saignements (traitements anti coagulants), demander un avis médical ou chirurgical en présence de tissus à risque (tendons, os, prothèses).

MODE D'EMPLOI :**Application :**

- Se laver les mains en respectant les règles d'hygiène en vigueur (par lavage ou friction),
- Préparer le matériel pour la réalisation du soin,
- Sortir et installer un sac collecteur de déchets,

FTC : 108871

06/03/2020

SP65-00053-02

- Sortir un blister stérile et un film adhésif transparent stérile nécessaires au soin,
 - Préparer les solutions de rinçage et/ou les produits de nettoyage et d'antiseptie prescrits,
 - Retirer le pansement souillé et le jeter dans le sac collecteur à déchets,
 - Se laver les mains par friction avec un gel hydro-alcoolique (non fourni),
 - Ouvrir le blister et prélever le champ de soin. L'installer face imperméable sur la table,
 - Retirer les compresses du blister à l'aide de la pince bleue et les déposer sur le champ de soin,
 - Avec la pince bleue, prendre une compresse et la saisir avec la pince verte pour en faire un tampon. Nettoyer la plaie suivant le protocole médical. Jeter les compresses souillées dans le sac collecteur à déchets.
- Utiliser la curette stérile fournie pour réaliser une détersion mécanique si nécessaire. Celle-ci est indiquée pour le grattage, la détersion ou le nettoyage des plaies avec présence de tissus nécrotiques et/ ou fibrineux. En cas de nécrose noire et sèche, il est conseillé au préalable de ramollir/ hydrater les tissus nécrotiques par l'action d'un pansement hydrogel.
- Recouvrir la plaie avec un pansement primaire (prescrit séparément),
 - Recouvrir le pansement primaire par le film adhésif transparent pour rendre le pansement étanche et permettre la douche. Enlever les deux feuilles de papier siliconées de l'adhésif, appliquer le film adhésif puis retirer la pellicule protectrice en tirant sur la languette bleue. Le film doit dépasser du pansement primaire d'au moins 2 cm,
 - Rassembler les déchets hors piquants, coupants, tranchants dans le sac collecteur fourni dans le set. Ce sac devra être éliminé dans le circuit des déchets d'activité de soins à risque infectieux.
- (Après utilisation, la curette doit être jetée dans un collecteur ou une boîte pour déchets perforants, non fourni dans ce set.)

Renouvellement :

Renouveler le soin en fonction de la prescription et/ou de l'état de la plaie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

N'ouvrir le dispositif médical qu'au moment de l'utilisation. Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant usage. Ne pas réutiliser le dispositif- en cas de réutilisation d'un dispositif médical à usage unique, il existe un risque de contamination, d'altération, de dysfonctionnement du produit.

Avant la détersion mécanique avec la curette, se conformer à la prescription médicale, faire l'évaluation de la plaie, mesurer l'index de pression systolique (IPS), respecter les tissus sains et éviter les saignements.

Le dispositif doit être utilisé par des professionnels de santé formés au soin des plaies.

STERILISATION :

Les blisters, les films et la curette sont stérilisés individuellement à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE:

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur, ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT:

Péremption déterminée par la date de péremption du composant le plus ancien.