

# joleti

## TABOURET DE DOUCHE JOLETI

Merci d'avoir choisi ce produit. Pour éviter les blessures lors de la manipulation et de l'utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Dans le manuel, l'utilisateur est la personne assise dans le fauteuil. Le soignant est la personne qui aide l'utilisateur.

### Description - Tabouret de douche

Ce tabouret de douche a une conception stable avec une flexibilité intégrée qui s'adapte aux sols inégaux. Tous les produits ont des pieds en aluminium réglables en hauteur qui sont simples à fixer. Les jambes sont inclinées vers l'extérieur pour maximiser la stabilité quelle que soit la hauteur. Tous les pro-

duits sont équipés d'embouts qui offrent une bonne adhérence, même sur des sols inégaux et humides. Les sièges sont conçus avec un motif antidérapant, assurant un siège sûr et antidérapant même lorsqu'il est mouillé. Les sièges ont également des trous de drainage qui éliminent efficacement l'excès d'eau.



Le produit est destiné à compenser divers types de blessures ou de handicaps qui limitent la mobilité de l'utilisateur.

Il offre une assise sûre et stable dans la douche ou la salle de bain.

Il est destiné aux adultes.

Il est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et des institutions.

Il convient à une utilisation dans des zones humides, mais pas dans des piscines ou des environnements corrosifs similaires.

Nom du produit	Tabouret de douche triangulaire	Tabouret de douche rond	Tabouret de douche rectangulaire
Charge Maxi	130 kg	200 kg	200 kg
Surface d'assise	45x45x45 cm	Ø 40 CM	43x38 cm
Hauteur d'assise	44 à 59 cm		
Matériel	Assise en polypropylène et pieds en aluminium		

### Contre-indications

Il n'y a pas de contre-indications connues.



Ce produit doit être recyclé conformément aux réglementations nationales.



# TABOURET DE DOUCHE JOLETI

## Montage

Avant l'assemblage, veuillez vérifier que les pièces ne sont pas déformées ou altérées. Vérifiez également qu'il y a des boutons de réglage de la hauteur sur les pieds et qu'ils fonctionnent correctement.

### Facile à assembler

L'assemblage est facile sans avoir besoin d'outils. Il suffit d'appuyer sur le bouton orange autobloquant et de le mettre en place. La forme ovale empêche les pieds de tourner lors du réglage.

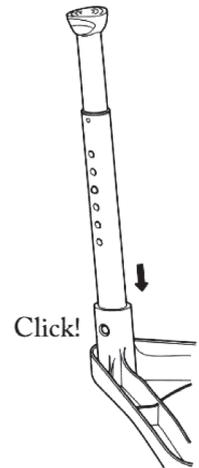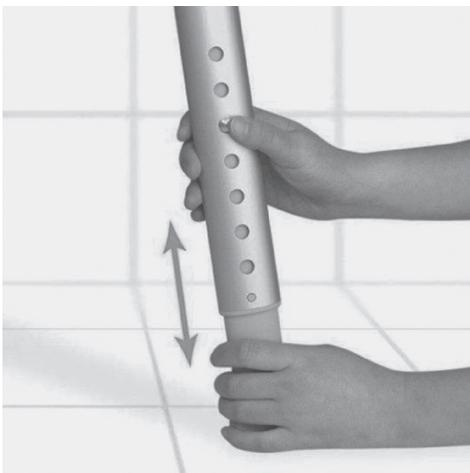

### Réglable en hauteur

Il est facile de régler la hauteur. Cliquez et appuyez simplement. La forme ovale empêche les pieds télescopiques de tourner lors du réglage.

Il n'y a pas de pièces détachées à égarer.

## Démontage

Appuyez simplement sur le bouton orange autobloquant et tirez les pieds.



### Sécurité et entretien

1. Un produit ou un accessoire défectueux ne doit pas être utilisé. Vérifiez le poids maximum de l'utilisateur.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un produit de nettoyage sans solvant avec un pH de 5-9 ou avec une solution désinfectante à 70 %.
3. Peut être décontaminé à max. 85° C/185°F pendant 3 minutes si nécessaire.

En cas d'événement indésirable lié à l'utilisation de l'appareil, celui-ci doit être signalé à votre revendeur local et à l'autorité nationale compétente en temps opportun. Le revendeur local transmettra les informations au fabricant.

### Réutilisation

Le produit peut être réutilisé. Le nombre de fois qu'il peut être réutilisé dépend de la fréquence et de la manière dont le produit est utilisé. Avant de le réutiliser, nettoyez et désinfectez soigneusement le produit et vérifiez ses caractéristiques de sécurité. Si nécessaire, prenez des mesures correctives.