

Bain de paraffine Pro (cuve émaillée) + 6 blocs de paraffine

Codes produits :

Référence : 253305



Caractéristiques du produit :

Puissance: 150 W

Longueur: 39 cm

Largeur: 25 cm

Hauteur: 18 cm

Poids: 3,1 kg

Description brève du produit :

La cuve de paraffine Pro est équipée d'une cuve émaillée, garantissant une résistance exceptionnelle et un entretien facile. Profitez d'une chauffe rapide en seulement 2 heures, un thermostat électronique précis, une prise terre pour une sécurité accrue, et recevez en bonus une grille de protection pour éviter les brûlures.

Livrée avec 6 blocs de paraffine (+/- 2,5 kg), cette cuve vous offre une expérience de traitement professionnel de qualité.

Description du produit :

La **cuve de paraffine Pro** se démarque des autres modèles, de par sa conception avec une cuve émaillée, beaucoup plus résistante dans le temps et bien plus facile à entretenir. La cuve émaillée permet de sortir plus simplement la paraffine, afin de nettoyer la machine et de changer la paraffine lorsque cela est nécessaire.

La cuve de paraffine pro est équipé d'un **couvercle transparent**, permettant de voir le produit, et de protéger la paraffine des contaminants extérieurs pendant la fusion et avant le traitement. Mais également d'une **grille de protection** pour éviter les brûlures dans le fond de la cuve, de **gants en plastique** et de **2 gants en éponge**.

Les points forts du bain de paraffine Pro

- **Cuve émaillée** : plus résistante dans le temps et plus simple à nettoyer.
- **Chauffe rapide** : environ 2h.
- **Thermostat électronique**, qui indique la température exacte de la paraffine.
- Équipée d'une **prise terre**, pour plus de sécurité.

- Livrée avec une **grille de protection** : pour éviter les brûlures.
- **Livrée avec 5 blocs de paraffine (+/- 2,5 kg)**.

- **Faible consommation électrique** une fois que la paraffine a fondu.
- Entièrement opérationnelle **24 h/24**.

La thérapie à paraffine

La thérapie à paraffine est une thérapie thermique utilisée principalement pour les troubles chroniques des articulations. La chaleur dégagée par la paraffine est particulièrement indiquée pour soulager l'arthrite, les blessures de sport (entorse, tendinite), la raideur des articulations ou les spasmes musculaires. Mais cette dernière est également utilisée pour réaliser des traitements esthétiques.

Le bain de paraffine assure l'immersion totale des surfaces osseuses de la main, du pied ou du coude.

Quels sont les bénéfices des traitements à base de paraffine ?

- Améliore l'élasticité de la peau.
- Facilite les mouvements et la mobilité.
- Conseillé pour les personnes souffrant d'arthrite, de fibromyalgies et autres symptômes pathologiques rhumatologiques.
- Stimule la circulation sanguine.
- Lisse et adoucit les peaux sèches et rugueuses.
- Nourrit la peau: accroît l'absorption des éléments nutritifs.
- Hydrate la peau et la rend plus éclatante.

Les contre-indications

- Blessures ouvertes.
- Irritation de la peau.
- Infection de la peau.
- Sensibilité thermique amoindrie.

Guide d'utilisation

Mains Pieds Mains

1. Placez la grille de protection dans le fond de la cuve, pour éviter tous risque de brûlure.
2. Enlevez tous les bijoux.
3. Nettoyez, désinfectez et séchez complètement la peau.
4. Appliquez une crème sur les mains et massez jusqu'à absorption complète.
5. Testez la température avant de plonger les mains dans le bain de paraffine (*ne pas plonger une partie du corps à une température au dessus de 56°*).
6. Trempez doucement la main dans la paraffine fondue et retirez-la. Répétez ce geste à 5 reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.
7. *Étape optionnelle : vous pouvez enfiler un gant en plastique sur votre main, puis dans un gant en éponge pour conserver la chaleur.*
8. Laissez agir pendant 10 minutes.
9. Retirez la paraffine comme un gant et jetez-la.
10. Appliquez un soin hydratant dès que vous retirez la paraffine, quand les pores sont encore ouverts, pour une meilleure absorption.

Pieds

1. Placez la grille de protection dans le fond de la cuve, pour éviter tous risque de brûlure.
2. Nettoyez, désinfectez et séchez complètement la peau.
3. Appliquez une crème sur les pieds et massez jusqu'à absorption complète.
4. Testez la température avant de plonger le pied dans le bain de paraffine (*ne pas plonger une partie du corps à une température au dessus de 56°*).
5. Trempez doucement le pied dans la paraffine fondue et retirez-le. Répétez ce geste à 5 reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.
6. *Étape optionnelle : vous pouvez enfiler un chausson en plastique sur votre main, puis dans un chausson en éponge pour conserver la chaleur.*
7. Laissez agir pendant 10 minutes.
8. Retirez la paraffine comme un chausson et jetez-la.
9. Appliquez un soin hydratant dès que vous retirez la paraffine, quand les pores sont encore ouverts, pour une meilleure absorption.

Les caractéristiques du bain de paraffine Pro

- Type de cuve : émaillée.
- Contenance : 2 à 3 kg de paraffine.
- Temps de fusion : +/- 2h.
- Type de thermostat : électronique avec affichage température.
- Température de chauffe : de 40° à 60°.
- Précision du thermostat : +/- 1,5°.
- Puissance : 150 W.
- Alimentation : secteur 220 V - 50/60 Hz.
- Dimensions extérieures : 39 x 25 x 18 cm.
- Dimensions intérieures : 32,5 x 18 x 13 cm.
- Poids : 3,1 kg.
- Grille de protection : oui.
- Paraffine inclus : oui (+/-2,5 kg).

Attributs du produit :