


**ORLIMAN**®

*Feet***PAD**

# COUSSINET GEL

Orteils



- **Domaines d'application :**  
Prévention.
- **Indications :**  
Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils en forme de griffe ou marteau.
- **Caractéristiques :**  
Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique avec anneau de fixation au 2e orteil.  
Lavable et réutilisable.  
Sans latex.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



POINTURE

- **Tableau de taille :**

Taille	Pointure	ACL13 (Gauche)	ACL13 (Droite)
S	35-38	34010.2945503.6	34010.2945443.5
M	39-42	34010.2945526.5	34010.2945489.3
L	43-46	34010.2945549.4	34010.2945495.4

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

 smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)

Siret : 420574626 RCS Rennes

## COUSSINET GEL

Orteils



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

**Prévention :**

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

**Consignes :**

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

**Composition :**  
Gel Polymère.

**Entretien :**

Nettoyage à la main et au savon  
(max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à température  
ambiante.

