

# i-Press 6C avec paire de bottes - appareil de pressothérapie

**Codes produits :**

Référence : 280034

**Caractéristiques du produit :**

Nbre de cellules: 6

Pression: 10 à 100 mmHg

**Description brève du produit :**

La technologie de l'i-Press 6C offre une pressothérapie séquentielle et programmable permettant une pression contrôlée sur chaque cellule et des mouvements coordonnés s'adaptant à la pathologie de vos patients.

Livré avec une paire de bottes 6 cellules Optimum.

**Description du produit :**

i-Press 6C avec paire de bottes 6 cellules Optimum

**Bottes Optimum 6 cellules** : un bon rapport qualité-prix, plus légères, elles permettent un traitement continu sur tout le membre grâce au chevauchement des alvéoles.

<https://youtu.be/izf2U5K6ucl>

Qu'est-ce que le drainage pneumatique ?

Le drainage pneumatique doit venir en complément, et non en remplacement des techniques. Il apporte aux praticiens une aide supplémentaire au traitement de leurs patients, voir un outil indispensable au traitement des œdèmes. Le drainage pneumatique conduit à la décongestion, il sera alors utilisé avant un drainage manuel, alors que dans d'autres cas, il pourra être utilisé en simultané, ou encore après un drainage manuel pour renforcer et prolonger ses effets.

Indications

- **Système Veineux** : Insuffisance veineuse, Varices, Problèmes de rétention d'eau « jambes lourdes », Ulcères.
- **Système lymphatique** : Dysfonctions du système lymphatique, Oedèmes.

- **Esthétique** : Détente, Complément des techniques d'amincissement.

Une technologie simplifiée

Programmé par pathologies et techniques (membres supérieurs, membres inférieurs et ceinture abdominale).

- Flux ascendant et descendant.
- Paramètres personnalisables (temps de travail, temps de repos, temps de séance, nombre de cycles...).
- Désactivation des cellules à partir de l'écran tactile.
- Ciblage de la zone de soin (Inférieur : cheville, genou, hanche / Supérieur : poignet, coude, épaule) :
  - **Segmentaire** : le programme s'applique uniquement sur la zone sélectionnée.
  - **Augmentation du temps de passage** : le programme s'applique sur tout le membre mais ralentira au niveau de la zone sélectionnée.
  - **Augmentation des passages** : le programme s'applique sur tout le membre mais passera 3 fois au niveau de la zone sélectionnée.
- Possibilité de sauvegarder les programmes modifiés et adaptés à chacun des patients.
- Flux constants grâce aux cellules à recouvrement (chevauchées) pour la version 10C.
- Produit silencieux.
- Logiciel intuitif s'adaptant aux besoins des praticiens.

Points forts :

- Recouvrement des cellules Naviguer simplement grâce à l'écran tactile et à l'interface conviviale.
- Trouver toutes les pathologies en consultant les programmes préétablis élaborés en partenariat avec des praticiens renommés.
- Un travail en parallèle du drainage manuel grâce à une compression spécifique différente selon les programmes recherchés (pression, cycle, rythme de travail...).
- La pression agit sur toute la circonférence et sur une surface relativement étendue.
- L'appareil permet de faire des programmes spécifiques proches de la physiopathologie (appel résorption, fragmentation...).
- Régler la séance selon vos besoins grâce à l'affichage du temps de traitement réel.
- Adapter le sens du gonflage des cellules en ascendant ou descendant.
- Aide à la prise en charge de pathologie chronique sévère type lymphœdème.
- Optimiser vos séances avec le dégonflage actif et automatique en fin de traitement.
- Offrir à vos patients un traitement adapté personnalisable et enregistrable : sélection et/ou isolement de cellules par pilotage électronique pour un traitement localisé (fini les manipulations fastidieuses).
- Raccorder facilement, un unique connecteur par accessoire.
- Appareil autonome : ne nécessite aucune intervention pendant le traitement.
- Une nouvelle clientèle : esthétique, relaxation, détente.
- Travailler avec des nouvelles bottes utilisant un matériau innovant : léger et d'une grande résistance, très confortable pour le patient.

Programmes clé de l'i-press : ≡ RESORPTION Indications : Jambes lourdes, pas de présence de varices, pas d'œdème.

Ces programmes sont utilisés lorsque le sujet se plaint de douleurs, lourdeurs, tiraillements dans les jambes. Ces signes sont provoqués ou accentués par une position debout ou assise prolongée, et s'installent progressivement au cours de la journée.

L'effet recherché étant une assistance veineuse, le programme de résorption va entraîner une accélération du flux veineux. Pour réaliser cette accélération, en évitant pour ce faire d'écraser les veines superficielles, les pressions exercées doivent rester relativement faibles. Ces pressions peuvent cependant être légèrement augmentées si le thérapeute veut agir sur le réseau veineux profond.

≡ EFFLEURAGE Indications : Jambes lourdes, présence de varices, obésité.

Ces programmes sont utilisés lorsque les jambes lourdes sont accompagnées de la présence de varices.

Il tient compte de l'endommagement des valvules veineuses (révélé par la présence de varices). Il effectue, après avoir vidé chaque portion de veine, un garrot de sécurité (en maintenant gonflée l'alvéole en amont de celle qui vient d'être dégonflée) pour que cette partie de la veine se remplisse physiologiquement par l'artère et non par le reflux veineux.

≡ FRAGMENTATION Indications : Œdème lymphatique persistant.

L'application de l'onde de pression est fragmentée :

La première application de la pression s'effectue à la racine du membre, les suivantes aux alvéoles en aval pour retourner vers la racine, et ainsi de suite. En dernière étape du cycle, l'onde de pression part de l'extrémité du membre pour arriver jusqu'à la racine.

Indications : Ce programme est utilisé lorsqu'un œdème, présent toute la journée, ne s'atténue pas au cours de la nuit. Le temps du traitement est important pour une efficacité optimale.

≡ RESORPTION PERISLALTIQUE GLOBALE Indication : Cellulite, méthode drainage.

L'alvéole 1 est gonflée puis dégonflée et regonflée, puis la 2 est gonflée, dégonflée et regonflée, et ainsi de suite pour les alvéoles suivantes jusqu'à la 7 ou 10 et sont dégonflées toutes à la fois en fin de cycle.

Le programme de résorption péristaltique est le plus proche des manœuvres de drainage lymphatique manuel.

Caractéristiques :

- I-press 6C : 6 cellules
- Dimensions (LxlxH) : 34 x 32 x 14 cm
- Poids : 4,9 kg
- Alimentation : 230 VAC / 50 Hz
- Puissance : 50 VA
- Niveau sonore : 38 | 40 dBA
- Pression réglable : 13 à 133 mbar (10 à 100 mmHG)

Livré avec une paire de bottes 6 cellules Optimum

**Attributs du produit :**