


**ORLIMAN**®

*FeetPAD*

# PROTECTION GEL

Talon



- Domaines d'application :

Prévention.

- Indications :

Prévient les pressions et les frottements dans la zone du talon, Évite la formation d'ampoules, Protège les blessures existantes du talon d'Achille.

- Caractéristiques :

Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.  
Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.  
Lavable et réutilisable.  
Sans latex.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



TAILLE UNIQUE

- Tableau de taille :

Taille	ACL13
Unique	34010.2945437.4

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

 smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)

Siret : 420574626 RCS Rennes



**ORLIMAN**

*FeetPAD*

## PROTECTION GEL

Talon



### ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

### Composition :

Gel Polymère avec face auto-adhérente.

### ■ Mise en place :

Enlever le film plastique qui protège l'adhésif et coller les protections à l'intérieur de la chaussure, au raz du bord supérieur. Auto-adhésif longue durée, lavable sans perte d'adhérence.

### Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

