



ORLIMAN®

FeetPAD

COUSSINET GEL

Métatarses



■ Domaines d'application :

Prévention.

■ Indications :

Soulage la douleur de la zone métatarsale et de l'avant du pied, Evite la formation de callosités et durillons.

■ Caractéristiques :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



TAILLE UNIQUE

■ Tableau de taille :

Taille	ACL13
Unique	34010 . 2945377 . 3


DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
 smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
 Siret : 420574626 RCS Rennes



ORLIMAN

*Feet***PAD**

COUSSINET GEL

Métatarses



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Composition :

Gel Polymère avec face auto-adhérente.

■ Mise en place :

Enlever le film plastique qui protège l'adhésif et coller les coussinets à l'intérieur de la chaussure, à l'avant du pied. Utiliser les coussinets dans leur chaussure respective (droite ou gauche) en prenant bien garde de positionner la partie la plus large en contact avec la zone des métatarses.

Entretien :

Lavage à la main (max 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

