

Bain de paraffine - cuve ABS



Codes produits :

Référence : 253304

Caractéristiques du produit :

Contenance: 3 L

Matière: ABS

Puissance: 150 W

Longueur: 39 cm

Largeur: 23 cm

Hauteur: 22 cm

Alimentation: Secteur 220/230 V AC

Description brève du produit :

Ce bain/ cuve de paraffine ABS est un outil professionnel, qui assure la fonte de vos barquettes de paraffine et son maintien à température d'utilisation. Il possède une capacité de 3L et une résistance réglable par thermostat de 40 à 60°.

Description du produit :

Ce **bain/ cuve de paraffine** est un outil professionnel, qui assure la fonte de vos barquettes, blocs ou billes de paraffine et le maintien à température d'utilisation tout au long du traitement. Cette cuve est très pratique de par ses dimensions compactes, sa grande contenance de 3L et sa résistance réglable par thermostat de 40 à 60°, avec des voyants lumineux signalant la température correcte.

De plus, cette cuve de paraffine est composée d'une carrosserie en ABS et d'un couvercle transparent, permettant de voir le produit, et de protéger la paraffine des contaminants extérieurs pendant la fusion et avant le traitement. L'ABS permet de ralentir la propagation de la chaleur à l'extérieur tout en gardant la température idéale à l'intérieur de la cuve.

Le chauffe paraffine est vendu seul, sans paraffine.

La thérapie à paraffine

La thérapie à paraffine est une thérapie thermale utilisée principalement pour les troubles chroniques des articulations. La chaleur dégagée par la paraffine est particulièrement indiquée pour soulager l'arthrite, les blessures de sport (entorse, tendinite), la raideur des articulations ou les spasmes musculaires. Mais cette dernière est également utilisée pour réaliser des traitements esthétiques.

Le bain de paraffine assure l'immersion totale des surfaces osseuses de la main, du pied ou du coude.

Quels sont les bénéfices des traitements à base de paraffine ?

- Améliore l'élasticité de la peau.
- Facilite les mouvements et la mobilité.
- Conseillé pour les personnes souffrant d'arthrite, de fibromyalgies et autres symptômes pathologiques rhumatologiques.
- Stimule la circulation sanguine.
- Lisse et adoucit les peaux sèches et rugueuses.
- Nourrit la peau: accroît l'absorption des éléments nutritifs.
- Hydrate la peau et la rend plus éclatante.

Les contre-indications

- Blessures ouvertes.
- Irritation de la peau.
- Infection de la peau.
- Sensibilité thermique amoindrie.

Guide d'utilisation Mains Pieds Mains

1. Enlevez tous les bijoux.
2. Nettoyez, désinfectez et séchez complètement la peau.
3. Appliquez une crème sur les mains et massez jusqu'à absorption complète.
4. Testez la température avant de plonger les mains dans le bain de paraffine (*ne pas plonger une partie du corps à une température au dessus de 56°*).
5. Trempez doucement la main dans la paraffine fondue et retirez-la. Répétez ce geste à 5 reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.
6. *Étape optionnelle : vous pouvez enfiler un gant en plastique sur votre main, puis dans un gant en éponge pour conserver la chaleur (non-fournis).*
7. Laissez agir pendant 10 minutes.
8. Retirez la paraffine comme un gant et jetez-la.
9. Pour une meilleure absorption, appliquez un soin hydratant dès que vous retirez la paraffine, quand les pores sont encore ouverts.

Pieds

1. Nettoyez, désinfectez et séchez complètement la peau.
2. Appliquez une crème sur les pieds et massez jusqu'à absorption complète.
3. Testez la température avant de plonger le pied dans le bain de paraffine (*ne pas plonger une partie du corps à une température au dessus de 56°*).
4. Trempez doucement le pied dans la paraffine fondue et retirez-le. Répétez ce geste à 5 reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.
5. *Étape optionnelle : vous pouvez enfiler un chausson en plastique sur votre main, puis dans un chausson en éponge pour conserver la chaleur (non-fournis).*
6. Laissez agir pendant 10 minutes.
7. Retirez la paraffine comme un chausson et jetez-la.
8. Pour une meilleure absorption, appliquez un soin hydratant dès que vous retirez la paraffine, quand les pores sont encore ouverts.

Les caractéristiques du bain de paraffine ABS

- Type de cuve : ABS.
- Contenance : 3 L de paraffine.
- Temps de fusion : 3/4h.
- Type de thermostat : électronique.
- Température de chauffe : de 40° à 60°.
- Puissance : 150 W.
- Alimentation : secteur 220-230 V - 50/60 Hz.
- Dimensions extérieures : 39 x 23 x 22 cm.
- Grille de protection : non.
- Paraffine inclus : non.

Attributs du produit :