

# ÉCARTEUR DE DOIGTS

Collection Correcteurs



- **Domaines d'application :**  
Rééducation, Prévention.
- **Indications :**  
Réduit les frictions, Réalignement de l'articulation, Évite les hallux-valgus.
- **Caractéristiques :**  
Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.

**TVA** 20 %

**LPPR** Non remboursé.



POINTURE

- **Tableau de taille :**

Taille	Pointure	ACL 13	Référence
S	35-38	34015.6117246.0	CP0613.2US
M	39-42	34015.6117252.1	CP0613.2UM
L	43-46	34015.6117269.9	CP0613.2UL

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**  
Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
Siret : 420574626 RCS Rennes

# ÉCARTEUR DE DOIGTS

Correcteurs



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

**Prévention :**

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

**Consignes :**

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

**Composition :**  
Gel Polymère.

■ **Mise en place :**

Placer le séparateur entre le gros orteil et l'orteil suivant. Ajuster si nécessaire.

**Entretien :**

Nettoyage à la main et au savon  
(max. 30°C).  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à température  
ambiante.

