

Regoball - bundle 80 mm + 32 mm

Codes produits :

Référence : 256158

Caractéristiques du produit :

Matière: Acier inoxydable

**Description brève du produit :**

Regoball combine les bienfaits de la cryothérapie / thermothérapie et du massage par rouleau. Idéal pour accélérer le processus de récupération musculaire, le soulagement des douleurs chroniques, des inflammations et le traitement ciblé de zones douloureuses du corps.

Description du produit :

Regoball, les boules de massage pour thermothérapie et cryothérapie

Regoball combine les bienfaits de la cryothérapie / thermothérapie et du massage par rouleau. Idéale pour accélérer le processus de récupération musculaire, le soulagement des douleurs chroniques, des inflammations et le traitement ciblé de zones douloureuses du corps.

Comment fonctionnent les Regoballs ?

La température a toujours été utilisée pour soulager le corps. Le froid plutôt pour accélérer la récupération musculaire, le traitement des hématomes, ... et le chaud pour son action bénéfique au niveau des contractures ou des tensions musculaires.

Regoball a été spécialement conçue pour vous apporter les techniques de régénération des plus grands sportifs. La sphère en acier inox contient un gel thermique qui accumule du froid ou du chaud. La température sera ensuite restituée dès que la boule va rouler sur la peau. La boule de massage thermique Regoball existe en 2 formats, 80 mm et 32 mm, pour s'adapter à la zone du corps à soulager.

- **Regoball 80 mm** : dévisser la bague supérieure et placer la boule dans un congélateur pendant 2 heures pour une utilisation à froid (jusqu'à 6 h) ou dans un bol d'eau bouillante pendant 15 mn pour une utilisation à chaud (jusqu'à 40 mn). Utiliser la boule (sous la voûte plantaire par exemple) ou la replacer dans sa coque pour une utilisation sur le corps (jambes, dos, épaules...) et sur tous les muscles endoloris.

- **Regoball 32 mm** (utilisation à froid uniquement) : Placer la Regoball 32 mm dans un congélateur ou un réfrigérateur pendant 2 heures. Utiliser la Regoball sur des zones ciblées de votre corps (visage, cou, mains). La balle peut être totalement retirée de son support afin d'être utilisée sous le pied (fasciite plantaire), sur le dos, les épaules... ou tout simplement pour être lavée.

Un outil pratique

Format ultra compact, Regoball tient dans la main et sa conception ergonomique permet une utilisation contrôlée sur la plupart des zones à cibler. Vous pouvez l'emmener partout avec vous à la salle de fitness, sur un terrain de sport, en voyage, ...

Les caractéristiques des Regoballs

- Boule en acier inoxydable contenant un thermogel, base en ABS résistant aux chocs
- ReGoBall 80 mm : Utilisation pour froid ou chaud.
- ReGoBall 32 mm : Utilisation pour froid sur des zones ciblées.

Attributs du produit :