


ORLIMAN®

FeetPAD

TUBE PROTECTEUR GEL

Orteils et doigts



- Domaines d'application :
Prévention.

- Indications :

Atténue la pression et la friction, Protège et hydrate les orteils, Favorise la cicatrisation, Protège les zones lésées.

- Caractéristiques :

Gel polymère.
Longueur 15 cm découpable.
Couleur : Blanc.
Lavable et réutilisable.
Sans latex.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



En fonction de l'orteil à protéger, du S au L.

- Tableau de taille :

Taille	Diamètre	ACL13
S	15 mm	34010.2945650.7
M	20 mm	34010.2945667.5
L	25 mm	34010.2945673.6

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

TUBE PROTECTEUR GEL

Orteils et doigts



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Composition :
Gel Polymère.

■ **Mise en place :**

Enfiler le tube protecteur gel sur l'orteil lésé.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température
ambiante.

