



PROTECTEUR

Hallux valgus et cors



- Domaines d'application :
Rhumatologie.
- Indications :
Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.
- Caractéristiques :
Absorbe et répartit les pressions sur l'hallux-valgus grâce à son gel polymère.
Ne glisse pas.
Lavable et réutilisable.
Modèle bilatéral.
Sans latex.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



POINTURE

- Tableau de taille :

Taille	Pointure	ACL 13
S	< 41	34015.6116347.5
L	≥ 41	34015.6116353.6



DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

PROTECTEUR

Hallux valgus et cors



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Composition :

Gel Polymère. Tissu :
Polyamide et Élastomère.

■ **Mise en place :**

Introduire le pied dans le coussinet, placer la languette entre le pouce et l'index du pied et mettre ensuite les chaussettes, les bas ou les collants par-dessus. Faites bien attention à la taille car une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire. Ils se mettent facilement en place et s'adaptent à tout type de chaussure. Note: si vous portez des chaussures de ville, nous vous recommandons de pulvériser l'intérieur de la chaussure avec un produit imperméabilisant.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température
ambiante.

