



SEMELLES SILICONE

Collection semelles



- Domaines d'application :
Prévention, Traumatologie, Rhumatologie

- Indications :
Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleurs post-chirurgicales, Port lors de la pratique sportive.

- Caractéristiques :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.
- 2 inserts : talon et métatarses.
- Épaisseur de la semelle : 8 mm.
- Lavable et réutilisable.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



POINTURE

- Tableau de taille :

Taille	Pointure	ACL 13	Référence
0	35 - 36	34015.6116270.6	CP0610.PA0
1	37 - 38	34015.6116287.4	CP0610.PA1
2	39 - 40	34015.6116293.5	CP0610.PA2
3	41 - 42	34015.6116318.5	CP0610.PA3
4	43 - 44	34015.6116324.6	CP0610.PA4
5	45 - 46	34015.6116330.7	CP0610.PA5

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.10/07/2018



SEMELLES SILICONE

Collection semelles



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Gel Polymère avec adhérence.
Sans latex.

■ Mise en place :

Pour obtenir le plus grand degré d'efficacité thérapeutique pour les différentes pathologies et prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la mieux adaptée (sur l'emballage, vous trouverez un tableau qui vous orientera sur les tailles et les équivalences en pointure).

1- Choisir la pointure appropriée.

2- Mettre une talonnette ou une semelle à chaque pied, sauf avis contraire du médecin.

3- Mettre la partie plate de la talonnette ou de la semelle en contact avec la semelle de la chaussure et la forme anatomique en contact avec le pied.

4- Il est recommandé d'utiliser des chaussures larges et des chaussettes.

5- Il est possible que vous ayez besoin d'une période de 2 à 3 jours pour vous habituer à la semelle, jusqu'à ce que son usage devienne agréable.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C).

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

