

Stimulateur circulatoire Pressothérapie

Réf: 001-1011-00

Les manifestations de la **maladie veineuse chronique** liées à l'insuffisance du retour veineux

❖ **Signes fonctionnels:** jambes lourdes, fourmillement, crampes nocturnes...

❖ **Signes physiques:** œdèmes, petites veines ou vaisseaux dilatés et visibles, varices, cellulite, peau d'orange...

Les mécanismes du **retour veineux** dans des conditions normale permettent une remontée du sang depuis les membres inférieurs vers le cœur par:

❖ **Compression des** veines de la voûte plantaire lors de la marche

❖ La contraction des muscles des **mollets** et des **cuissees**.

❖ **Des valvules anti-retour** sur les parois des veines qui freinent la descente du sang vers les pieds.



Nouveau

Déposé à :
ansm
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé



PRO2 est le traitement naturel à domicile de la **maladie veineuse chronique** et de ses effets.

- ❖ Amélioration dès la 1ère séance des signes fonctionnels.
- ❖ Agit en profondeur et de manière pérenne sur les signes physiques en rétablissant l'élasticité des veines.

- ▶ Simule le **fonctionnement naturel** du retour veineux, rétablit une **circulation veineuse** quasi normale
- ▶ **2 à 3 séances** par semaine sont suffisantes, agit de façon très **efficace** dès la **1ère**
- ▶ **Pas de contre indications** pour les utilisateurs de **pacemaker** ou défibrillateur implanté (**DCIA**)

Caractéristiques techniques

- Appareil médical règlementé UE 2017/745 sous UDI, certifié par TÜV SÜD, développé en étroite collaboration avec des phlébologues Allemands.
- Pression jusqu'à 120mmHg, ajustable par l'utilisateur via un bouton de régulation précis et ergonomique.
- Réglage de la durée de la séance avec un bouton rotatif de minuterie, de 0 à 60 minutes.
- Bouton pour un gonflage ou dégonflage automatique des jambières.
- Sac de transport pour le compresseur, les jambières, les tuyaux de raccordement.
- Deux jambières dotées de 3 chambres de compression, long. 85cm, conçues pour un tour de cuisse de 70cm max.*
- Fermeture éclair de qualité pour résister efficacement à la pression.
- Enserre les pieds et la voûte plantaire à l'intérieur des jambières pour un effet en profondeur.

* Commercialisation en accessoires de jambières de 70cm, extension de 3cm pour le tour de cuisse (x3 possible), de manchons, tous non fournis.

Maux traités par PRO2

- Jambes lourdes ou gonflées.
- Fourmillement dans les jambes.
- Crampes nocturnes.
- Engourdissement.
- Varices et varicosités.
- Lipodoème.
- Prévention des embolies chez les personnes longuement alitées.
- Œdèmes lymphatiques
- Ulcères au mollet liés au pb de retour veineux.
- Congestion liée à une blessure articulaire
- Hématome suite à une blessure.
- Enflure suite à un étirement ou une entorse.
- Favorise la récupération après un traumatisme (opération, effort physique, coups..)

L'appareil de pressothérapie VenenWalker Pro2 est un appareil entièrement automatisé, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers ou professionnels de santé. Il compresse les jambes grâce à une technique de compression pneumatique intermittente. Classé Iia, ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Il est dangereux d'effectuer un autodiagnostic et de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d'auto-mesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d'utilisation pour davantage d'informations sur les mises en garde concernant l'utilisation du VenenWalker Pro2.

Mandataire européen : GlobalMind Consumer Electronics GmbH Ernst – Mantius – STR. 11 D-21029, Hamburg, Allemagne, pour davantage d'informations sur le fabricant et l'importateur, consulter la notice d'utilisation.

Contenu du Pack

- Bloc de commande (x1)
- Jambières standards 85cm (x2)
- Flexibles de raccordement (x2)
- Sac de transport (x1)
- Mode d'emploi multilingues (DE,EN,FR,NL,PL), (x1)



Accessoires VenenWalker PRO2

Produits	Référence	EAN	PCB
Jambières courtes 70cm	002-1008-21	4059266020211	10
Jambières standard 85 cm	002-1008-11	4059266020112	10
Extensions Jambières 85cm	002-1008-10	4059266020105	10
Manchon droit	002-1008-15	4059266020150	10
Manchon gauche	002-1008-16	4059266020167	10

Informations commerciales – Pack préssothérapie - réf. 001-1011-10

Données master carton	Poids: 12.7 Kg Dimensions: 54 x 36.5 x 31 cm Pcs / boîte: 3	Données produit Bloc de commande	Dimensions: 240 mm (L) x 245 mm (l) x 85 mm (h) Poids: 1.7Kg
Données packaging	Dimensions: 355mm(L) x 175m (l) x 275 mm (h) Poids: 3,7Kg	Données produit Jambière	Dimensions: 850 mm (L) , diamètre cuisse env. 700mm Poids: 0.6Kg
Code EAN Code HS DEEE Ecologic	4059266010229 90191090000 0.42 HT	Données produit Sac de transport	Dimensions: 21cm(L) x 24 cm (l) x 20 cm (h) Poids: 0.3Kg

Informations techniques – Pack Pressothérapie – réf. 001-1011-10

Jambières	3 chambres de compression Longueur: 85 cm Circonférence: 70 cm Pieds: 42 cm Matériaux: nylon Pression: 120mmHg maximum	Données électriques Bloc de commande	Tension: 230 Volt Fréquence: 50 Hz Courant absorbé: 0.1 A Puissance: 25W Fusible: T3.15A250V Indice de protection : Type IIB
Flexibles de raccordement	Longueur 160cm	Niveau de protection étanchéité Bloc de commande	IP21

Contre-indications à l'utilisation de PRO2

- Insuffisance cardiaque congestive
- Thrombophlébite généralisée, thrombose ou soupçon de thrombose
- Erysipèle aiguë
- Hypertension sévère incontrôlée.
- Neuropathie prononcée des extrémités.
- Phlegmon aiguë.
- Syndrome des loges.
- Grave traumatisme des parties molles des extrémités.
- Processus occlusifs de l'écoulement de la lymphe.

Si vous n'êtes pas certain de souffrir ou non de l'une des maladies décrites ci-dessus, consultez un médecin avant d'utiliser le pack de préssothérapie PRO2.

Retrouvez plus d'informations sur l'appareil VenenWalker PRO 2 sur: www.venenwalker.fr

L'appareil de préssothérapie VenenWalker Pro2 est un appareil entièrement automatisé, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers ou professionnels de santé. Il compresse les jambes grâce à une technique de compression pneumatique intermittente. Classé IIa, ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Il est dangereux d'effectuer un autodiagnostic et de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d'auto-mesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d'utilisation pour davantage d'informations sur les mises en garde concernant l'utilisation du VenenWalker Pro2.

Mandataire européen : GlobalMind Consumer Electronics GmbH Ernst – Mantius – STR. 11 D-21029, Hamburg, Allemagne, pour davantage d'informations sur le fabricant et l'importateur, consulter la notice d'utilisation.