



Notice d'utilisation VM312

Réveil parlant à gros bouton



INSTALLATION DES PILES

Le réveil est alimentée par 3 piles AAA (non incluses).

Sur la base du réveil, vous trouverez le compartiment à piles. Installez les piles en vous assurant que la polarité est correcte, puis refermez le couvercle.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Il y a 3 boutons sur ce réveil:

- (S1) Gros bouton du dessus
- (S2) Au dos du réveil se trouve un petit bouton noir « SET »
- (S3) Commutateur de volume haut/bas « HIGH / LOW »

RÉGLAGE DE L'HEURE, DE LA DATE ET DE L'ALARME

Vous ne disposez que d'environ 10 secondes pour changer n'importe quelle valeur, puis le réveil émettra un bip pour indiquer qu'il est revenu à la normale.

- Pour régler l'heure : appuyez sur S2 puis sur S1 jusqu'à l'heure souhaitée.
- Pour régler les minutes : appuyez sur S2 deux fois puis sur S1 jusqu'aux minutes souhaitées
- Pour définir l'année : appuyez sur S2 trois fois puis sur S1 jusqu'à l'année souhaitée.
- Pour définir le mois : appuyez sur S2 quatre fois puis sur S1 jusqu'au mois souhaité.
- Pour définir le jour : appuyez sur S2 cinq fois puis sur S1 jusqu'au jour souhaité.
- Pour régler l'heure de l'alarme : appuyez sur S2 six fois et procéder comme pour le réglage de l'heure.
- Définir les minutes de l'alarme : appuyez sur S2 sept fois et procéder comme pour le réglage des minutes.
- Définir l'alarme : appuyez sur S2 huit fois puis appuyez sur S1 pour allumer/éteindre l'alarme.

UTILISATION

Appuyez une fois sur S1 pour entendre l'heure.

Appuyez deux fois sur S1 pour entendre la date.

Une fois l'alarme déclenchée, appuyez sur S1 pour faire taire l'alarme.

Utilisez le bouton S3 pour changer le volume.

GARANTIE

- Aidapt garantit le produit sans défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze mois.
- Le produit que vous achetez peut parfois différer légèrement à partir des illustrations. Cette garantie est en complément et sans incidence sur votre droit légal.
- Notre garantie est administrée par nos détaillants.
- Si votre produit arrive endommagé, vous devez contacter le détaillant chez qui vous l'avez acheté. Les coordonnées du détaillant figureront sur la facture du produit, ou sur le mail que vous avez reçu lorsque vous avez passé la commande.
- Ne contactez pas Aidapt, uniquement votre revendeur, qui peut organiser un remplacement.
- Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie et doit être réparé ou remplacé, vous devez contacter le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté.

Si vous venez de recevoir votre produit et avez besoin d'une aide technique pour l'utiliser, veuillez appeler notre service d'assistance au (0845) 459 4816.