



RÉFÉRENCE : **POU 7517 COA**

Poudre hémostatique stérile Coalgan®



■ Gamme **Urgence & Accessoires**

Gencod : 3401521069908

DESCRIPTION

* Flacon refermable de 8 g de poudre hémostatique bio-active stérile

COMPOSITION & PRESENTATION

Poudre d'alginate de calcium bio active stérile (origine végétale)
Le conditionnement proposé est un flacon de 8 g avec double capuchon de protection, et est utilisable 6 mois après ouverture
Information complète sur la notice incluse

UTILISATION

Ce conditionnement est conseillé pour le traitement des zones difficiles d'accès (entre les doigts, ou le cuir chevelu par exemple) mais également pour les soins des plaies étendues. Cette présentation ne nécessite pas l'application d'un pansement, et peut être utilisée sans toucher la plaie
Cette poudre ne doit être utilisée qu'avec du sérum physiologique pour le pré nettoyage de la plaie (pas de chlorhexidine)

Dispositifs médicaux de classe II b avec obligation de traçabilité

INDICATION

Coalgan Poudre est indiqué en cas de :



INTERACTIONS

Coalgan ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivres.
Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d'appliquer Coalgan®

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.