

GARROT TOURNIQUET

joleti



Notice : Lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions, ce garrot est un dispositif sûr et efficace pour stopper le saignement des extrémités menaçant le pronostic vital. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous n'avez pas le temps d'examiner la provenance du saignement, le garrot peut être appliqué dans un premier temps sur les vêtements (le plus haut possible sur le bras ou la jambe). Le garrot ne doit pas être appliqué sur des objets solides pouvant être présents à l'intérieur des vêtements. Dès que possible, repérez la blessure et positionnez le garrot 2-3 pouces au-dessus directement sur la peau.

1



Poser le garrot à proximité du saignement, et passer la boucle autour du membre blessé

2



Tirer, serrer et fixer la bande (ajuster la bande)

3



Attacher la bande autour du membre

4



Tourner la tige jusqu'à l'arrêt total du saignement

5



Fixer la tige dans le clip et la verrouiller

6



Fixer la tige et la bande avec la sangle puis enregistrer l'heure de l'application

Avvertissement : Veuillez lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. Une application inappropriée peut entraîner des blessures graves ou la perte d'un membre.