

Protocole d'utilisation

Filtranios PS 1000

Conseil : Avant la première utilisation, stériliser Filtranios PS 1000 à l'autoclave :
134°C - 18 minutes (60 cycles) ou 125°C - 20 minutes (90 cycles)

Début de journée opératoire



Purger le robinet.



Ouvrir le sachet de stérilisation, enclencher le filtre, sans le toucher, sur le robinet en soulevant la bague du raccord rapide.



Le filtre est prêt pour une journée opératoire.

Fin de journée opératoire



Après utilisation, enlever le filtre du col de cygne en soulevant la bague du raccord rapide.



Enlever le bouchon de purge. Retourner le filtre et laisser s'écouler l'eau résiduelle.
Essuyer l'extérieur du filtre avec un champ propre.



Repositionner le bouchon sans le fixer totalement. Faire une encoche sur le disque de traçabilité. Emballer dans un sachet de stérilisation. Stériliser en suivant les recommandations du fabricant.

Stérilisation toutes les 24 heures