

meso-relle®

Raccordo multiniettore

Needles-syringe connector multinjector

Raccord seringue-aiguilles multipuncteur

Nadel -Spritzen- Verbindung für Mehrfachinjektionen

Conector multiinjector para aguja-jeringa

Mode d'emploi

Le connecteur Mesorelle adapte une seringue à plusieurs aiguilles permettant de pratiquer, en une seule fois, une injection hypodermique multiple.

Le connecteur Mesorelle doit être fixé à la seringue après le remplissage de celle-ci. Les aiguilles sont ensuite fixées à l'ensemble et la purge de l'air résiduel se fait comme pour une seringue montée normale. Les modèles disponibles sont linéaires 3, 5 ou circulaires 3, 5, 7 et peuvent respectivement porter aiguilles Luer. Les matériaux utilisés pour le connecteur Mesorelle sont transparents et permettent ainsi de visualiser la chambre de répartition et d'injection.

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation, elle garantit la stérilité du produit.

Ce produit doit être conservé dans un lieu tempéré et sec, à l'abri de la lumière.



M.V. srl – Via Don G. Dossetti 5/7 – 46023 Palidano di GONZAGA (MN)

Distributor: BIOTEKNE srl, - Via della Bastia, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)



STERILE EO



Ultimo aggiornamento: Maggio 2011

wird die Sterilität
garantiert; und
trocken lagern; direkts
Sonnenlicht vermeiden.