

gridinlux



FITNESS GYM **GUN 280**

Masajeador Muscular

20 niveles de intensidad. Batería LONG LIFE.

1600-2500 rpm.

MANUAL

ESPAÑOL | PORTUGUÊS | ENGLISH | FRANÇAIS | ITALIANO | DEUTSCH

Chère cliente, cher client,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous accordez à notre marque, en nous choisissant comme une garantie sûre pour améliorer votre qualité de vie.

Chez Gridinlux, nous travaillons constamment à la conception de produits qui contribuent à faciliter votre vie quotidienne. Nous investissons énormément dans la recherche et le développement, en mettant au point, grâce aux technologies les plus récentes, des systèmes efficaces basés sur ce qui a le plus de valeur à nos yeux : les personnes.

À partir d'aujourd'hui, nous serons à vos côtés pour vous aider dans tout ce dont vous avez besoin. C'est notre véritable engagement.

N'oubliez pas que :

1. Les photos du produit dans le manuel et sur la boîte correspondent au modèle le plus récent et ne sont données qu'à titre indicatif.
2. Ce manuel contient des recommandations d'utilisation.

Antonio Castellano

Chef de produit Europe



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique qu'au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.



GUN 280



GUN 240



GUN 245



GUN 265

Profitez de tous les avantages offerts par la technique de massage par percussion grâce à notre gamme **FITNESS GYM GUN**. Technologie de dernière génération conçue pour offrir une précision maximale dans les massages sportifs. Conçu pour être utilisé avant, pendant et après l'entraînement, ainsi que pour la préparation de compétitions de haut niveau ou simplement pour ceux qui souhaitent recevoir un massage relaxant à la maison.

Obtenez une performance musculaire maximale grâce à la gamme **FITNESS GYM GUN**.

Ce type de massage à percussion, grâce à des mouvements rapides qui exercent une pression concentrée et spécifique sur la zone musculaire souhaitée, contribue à la libération de la charge musculaire dans cette zone de votre corps, vous offrant ainsi d'innombrables bienfaits.

- ▶ Efficace contre les nœuds musculaires et les contractures.
- ▶ Détend la musculature.
- ▶ Efficace pour votre flexibilité, votre coordination et vos performances.
- ▶ Aide à prévenir les courbatures et les douleurs musculaires.
- ▶ Aide à réduire les sensations de stress et de fatigue.
- ▶ Soulage les spasmes et les raideurs musculaires.
- ▶ Accélère la récupération entre les séances d'entraînement.
- ▶ Active et réchauffe les muscles pour qu'ils soient actifs en série.

Recommandations d'utilisation:

- Utilisez l'appareil en appuyant légèrement sur les zones musculaires que vous souhaitez masser. Bougez lentement pendant 60 secondes pour chaque zone souhaitée.
- Utiliser la fonction **HIPERVOLT** (puissance maximale) uniquement sur les zones musculaires, ne pas l'utiliser sur la tête ou toute autre partie dure/osseuse du corps.
- Gardez vos cheveux à l'écart de l'avant de l'appareil afin d'éviter tout pincement et/ou enchevêtrement pendant l'utilisation. Ne mettez pas votre doigt dans cette zone lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne rechargez la batterie de l'appareil qu'avec le chargeur fourni.

Avertissements :

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Notre marque n'est pas responsable des éventuelles blessures ou problèmes causés par une mauvaise utilisation de ce produit si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies correctement.
- Cet appareil est équipé d'un moteur de percussion de haute précision. Il doit être manipulé avec beaucoup de précautions et il faut veiller à éviter les chutes ou les chocs pendant l'utilisation.
- Il est équipé d'une batterie située à l'intérieur de la poignée. Lorsqu'elle est complètement chargée, débranchez l'appareil. Ne pas laisser l'appareil branché pendant une longue période.
- Il est possible que des débris noirs se trouvant à l'intérieur de l'appareil tombent de la tête pendant l'utilisation. Ne vous inquiétez pas, il s'agit de débris provenant du processus de fabrication. Nettoyez-les et continuez à utiliser l'appareil normalement.
- Ne mouillez pas l'appareil et ne le placez pas à proximité de sources de chaleur.

- Les points de ventilation doivent toujours être dégagés et exempts de poussière et de débris.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant plus d'une heure. Prévoyez 30 minutes entre chaque utilisation.
- Débranchez le chargeur de batterie après l'avoir chargé et avant de l'utiliser.
- N'essayez pas de réparer ou de manipuler cet appareil. Pour toute question ou réparation, veuillez contacter le service technique spécialisé.
- Si vous constatez que l'appareil n'est pas en bon état, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé.
- Cet appareil est destiné à être utilisé par des adultes uniquement. Nous ne recommandons pas son utilisation pour les enfants.
- Nous déconseillons l'utilisation de cet appareil aux femmes enceintes, aux porteurs de stimulateurs cardiaques, aux personnes dont les articulations sont opérées, aux personnes souffrant d'une hernie discale ou de tout autre problème osseux et/ou musculaire.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Comment cela fonctionne-t-il ?


La gamme **FITNESS GYM GUN** est conçue pour être très facile à utiliser. La première chose à faire est d'activer le bouton ON/OFF situé sur la partie inférieure de la poignée. En position ON, l'appareil s'allume. En position OFF, il s'éteint complètement.

* **GUN 240:** Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour l'allumer. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre.

Le panneau de commande principal permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité du massage en appuyant sur les boutons.  

* **GUN 240:** Pour modifier l'intensité, appuyez sur le bouton  lorsqu'il est allumé.

Pour mettre l'appareil en pause, il suffit d'appuyer sur le bouton .

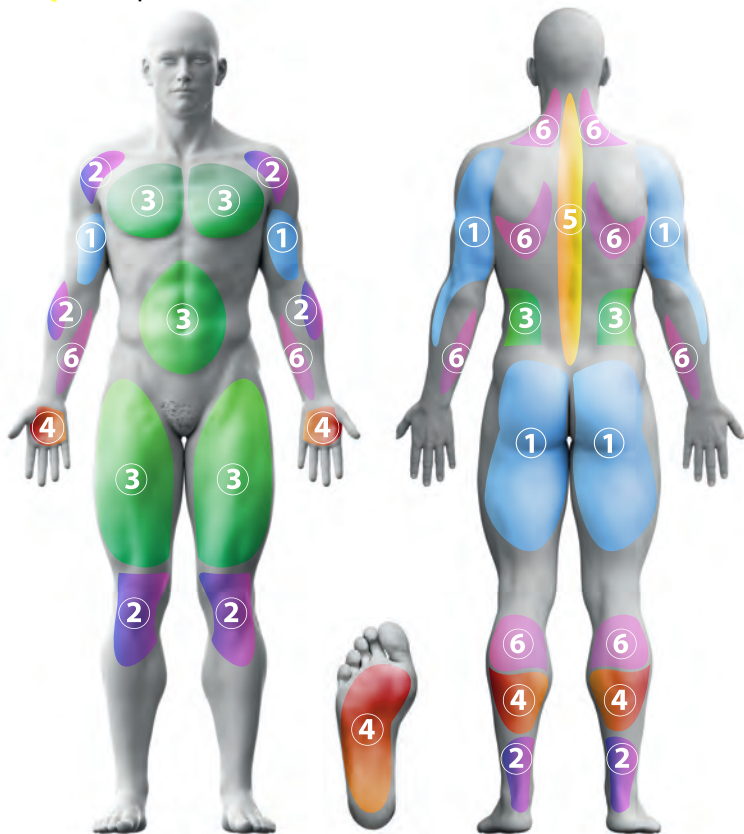

Cabezales de Masaje



1 BOLA

Applique une résistance régulière et douce sur les zones à masser. Convient à la relaxation des muscles sur l'ensemble du corps.



2 BALA

Applique une résistance spécifique sur les tissus musculaires profonds. Idéal pour des massages précis sur les tendons, les points d'acupuncture, etc.



3 T-HEAD

Applique une résistance uniforme aux surfaces musculaires superficielles et étendues, telles que la poitrine, l'abdomen et les jambes.



4 THUMB

Convient pour le massage de zones musculaires bien définies, telles que la plante des pieds et la paume des mains.



5 U-HEAD

Chaque pointe exerce une force concentrée et uniforme. Conçu pour être appliqué le long de la colonne vertébrale, évitant ainsi de toucher la



6 D-HEAD

Sa surface étroite et allongée est idéale pour accéder aux zones latérales et intermusculaires, masser et dessiner les contours de la musculature.



Avertissement

Aucune des têtes ne doit heurter directement une protubérance osseuse, car cela peut entraîner des dommages et des blessures. Ne pas utiliser sur la tête.

Ne pas masser si vous souffrez d'une lésion musculaire. En cas de doute ou de plainte, arrêtez le massage et consultez un spécialiste.

Garantie et SAT

Le produit que vous avez acheté est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, à condition que la facture d'achat soit conservée et envoyée, que le produit soit en parfait état physique et qu'il ait été utilisé correctement, comme expliqué dans ce manuel d'utilisation.

La garantie ne couvre pas:

- Si le produit a été maltraité, frappé, endommagé par l'humidité, immergé dans un liquide ou une substance corrosive, ou tout autre défaut généré par le consommateur en raison d'une utilisation incorrecte.
- Si le produit a été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par l'organisme officiel Gridinlux TAS.
- Si l'incident a été causé par l'usure due à l'utilisation de l'appareil.

Le service de garantie couvre les défauts de fabrication pendant 3 ans conformément à la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. En cas d'utilisation incorrecte par l'utilisateur, le service de garantie ne sera pas responsable de la réparation. Si vous constatez un incident avec le produit ou si vous avez des questions, veuillez contacter le service d'assistance technique officiel de Gridinlux via l'adresse e-mail :

teayudamos@gridinlux.es



FITNESS GYM GUN 265

PUISSANCE	45W 7.8 V
BATTERIE	2PCS -2000mAh
TEMPS DE CHARGE	5-6 H USB
DURÉE BATTERIE	2-8 H
VITESSE DE COURSE	1600-2600 rpm
NIVEAUX D'INTENSITÉ	20
BRUIT	≤60db
MESURES PRODUITS	119 x 48 x 153 MM

FITNESS GYM GUN 245

PUISSANCE	45W 16.8 V
BATTERIE	4PCS -2000mAh
TEMPS DE CHARGE	4 H ADAPTADOR
DURÉE BATTERIE	2-8 H
VITESSE DE COURSE	1200-2450 rpm
NIVEAUX D'INTENSITÉ	20
BRUIT	≤60db
MESURES PRODUITS	181,5 x 65 x 237,5 MM

FITNESS GYM GUN 240

PUISSANCE	45W 12.6 V
BATTERIE	3PCS -2000mAh
TEMPS DE CHARGE	4 H ADAPTADOR
DURÉE BATTERIE	2-8 H
VITESSE DE COURSE	1500-2500 rpm
NIVEAUX D'INTENSITÉ	3
BRUIT	≤60db
MESURES PRODUITS	138 x 65 x 180 MM

FITNESS GYM GUN 280

PUISSANCE	25W 12.6 V
BATTERIE	3PCS -1500mAh
TEMPS DE CHARGE	3-4 H USB
DURÉE BATTERIE	1,5-6 H
VITESSE DE COURSE	1600-2600 rpm
NIVEAUX D'INTENSITÉ	20
BRUIT	≤60db
MESURES PRODUITS	210 x 160 x 70 MM

gridinlux

gridinlux.es

Gridinlux S.L.U. | CIF: B86889458 | **gridinlux.es**

Avenida La Balletera s/n, parcela C4, 19208 Alovera, Guadalajara, España