



[Fiche technique]

## **Civière de relevage aluminium**

Réf. 506301

### **Civière de relevage en forme de cuillère légère et robuste.**

Munie d'un dispositif d'ouverture centrale permettant de glisser les deux parties longitudinales de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient. L'immobilisation du patient est parfaite.

La longueur est adaptable en 3 positions avec verrouillage automatique et sécurisé par goupille à ressort.

La civière se plie en deux pour un stockage aisé.

Surface du plan de couchage rainurée concave.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Dépliée 167.5 à 204 x 45 x 7 cm. Pliée 120 x 45 x 8,4 cm
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Unité de vente</b>	A l'unité sous carton
<b>Poids</b>	8,6 kg
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Charge maximale admissible</b>	159 kg
<b>Livré avec</b>	3 sangles de maintien 2 parties polypropylène noir (avec boucle métal à déverrouillage rapide) 130 cm Système de serrage par coulissement
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Normes et Certification</b>	Dispositif médical de classe 1. Conforme EN 1865 CE et ISO 13485
<b>Instructions d'utilisation</b>	La civière de relevage est munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger la victime. Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage. Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles.
<b>Entretien</b>	Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre. Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet. Vérifier la civière et les fixations des vis chaque semaine.
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 233111 - Housse de transport pour civière SCOOP ®

## Photos



Brancard cuillère alu pliable  
avec 3 sangles araignées



Brancard cuillère alu pliable  
avec 3 sangles araignées



Brancard cuillère alu pliable  
avec 3 sangles araignées



Brancard cuillère alu pliable  
avec 3 sangles araignées



Brancard cuillère alu pliable  
avec 3 sangles araignées

