

ECODECO

Notice

D'utilisation.

• Chaise Percé structure bois et
similicuir couleur Taupe.
Gamme 2024

Outillage de montage	Aucun
----------------------	-------

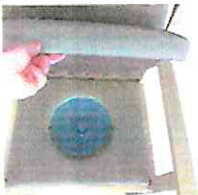
Composant		
Une chaise avec accoudoir en bois, dossier structure assise en bois et similicuir couleur taupe.	A	
Un plateau pour l'assise en similicuir couleur taupe.	B	
Un sceau	C	

- 

1

La chaise vous est livrée dans un carton et celle-ci est protégé par un emballage en feutrine et carton pour garantir une protection pendant la livraison.
- 

2

Mise en place du sceau repère C. Placez-vous à l'arrière de la chaise repère A et positionner le sceau entre l'assise percé et le plateau du support de celui-ci. *Lors de l'utilisation, vous retirez le couvercle du sceau.*
- 

3

Lors de l'utilisation de la chaise, retirez le plateau supérieur repère B. N'oubliez pas de retirer le couvercle avant l'utilisation.